

ОКП 94 5150

РУ № ФСР 2009/06388 от 16.11.2015 г.

ТЕЛЕЖКА ВНУТРИКОРПУСНАЯ ТВК-1 ПАСПОРТ тЦД3.531.000 ПС



Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием,
рекомендуем тщательно изучить паспорт перед эксплуатацией.
Сохраняйте паспорт для использования в будущем.

1. Назначение, технические характеристики, комплектность

1.1. Тележка предназначена для перевозки различных грузов, контейнеров с медикаментами, белья, одежды, матрацев, медицинской аппаратуры и прочего. Применяется в медицинских учреждениях.

Климатическое исполнение УХЛ 4.2.

Таблица 1

Длина, мм	1120 ± 30
Ширина, мм	650 ± 6
Высота, мм	900 ± 27
Масса, кг, не более	45
Номинальная нагрузка, кг	100 ± 0,5
Усилие перемещения тележки с нагрузкой массой (100 ± 0,5 кг), не более, кгс	12 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет

Таблица 2

Наименование	Кол-во, шт.
1. Платформа	1
2. Ручка	1
3. Ограждение	1
4. Винт В1 М6-6q x 30.58 ГОСТ 17473	4
5. Паспорт тЦД3.531.000 ПС	1

Допускается поставка тележек в собранном виде.

Акционерное общество
"Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001.
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

2 Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

2.1. Тележка, изображённая на рисунке 1, состоит из платформы 1, установленной на четыре колеса 8, два из которых самоориентирующиеся, ручки 6 с механизмом запора 7, ограждение 4 с винтами 2, подкладки 5 с креплением 3.


2.2. Для подготовки к работе, необходимо распаковать тележку и очистить её от упаковочного материала, провести техническое обслуживание согласно раздела 5 паспорта.

2.3. Порядок сборки тележки (см. рис.):

- установить на бужи платформы 1 ручки 6, вставить в отверстия ручки (снизу платформы) винты М6 по 2 на каждый буж, завернуть с усилием до упора;
- установить ограждение 4 на платформу, закрепить на платформе винтами (винты 2 перед установкой частично отвернуть);
- опустить ограждение 4 на упоры ручки 6, запор 7 должен зафиксировать ограждение от поворота;
- для поворота ограждения 4 в вертикальное положение, при этом ограждение 4 служит как дополнительная стенка, позволяющая увеличить объем погрузки легких объемных грузов (матрацев, белья и т. п.) ;
- для проведения санитарной обработки тележки и подкладки снять подкладку 5 с платформы - для этого отвернуть в каждом из 4-х углов подкладки винты 3 с гайками снизу платформы. Снятие ограждения 4 и установка подкладки 5 производятся в обратном порядке.

2.4. Запрещается эксплуатация тележки с неисправными колесами, механизмом фиксации ограждения и другими частями.

2.5. В связи с дальнейшим совершенствованием изделия, его конструкция может несколько отличаться от приведенной в паспорте.

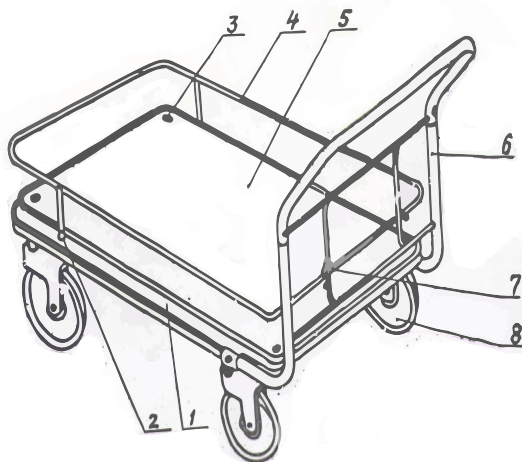

1 - платформа; 2- винт; 3 - винт с гайкой; 4 - ограждение; 5 - подкладка;
6 - ручка; 7 - механизм запора; 8 - колесо

Рисунок 1



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 12 ноября 2015 года № ФСР 2009/06388

На медицинское изделие
Тележка внутрикорпусная ТВК-1 по ТУ 9451-035-07614107-2006

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
(АО "ДЗМО"), Россия,
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,
участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Производитель
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
(АО "ДЗМО"), Россия,
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,
участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Место производства медицинского изделия
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,
участок №3, здание №3/2; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание №5/1


Номер регистрационного досье № РД-9081/44546 от 28.10.2015

Вид медицинского изделия 202390

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5150

приказом Росздравнадзора от 12 ноября 2015 года № 8322
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

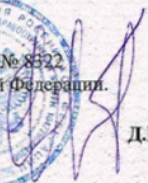Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения  Д.В. Пархоменко

0015399

3. Техническое обслуживание

- 3.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений; замене, при необходимости, годными деталями изношенных; смазке раз в год подшипников колёс.
- 3.2. Проверка технического состояния с целью установления возможности дальнейшего использования тележки проводится на соответствие технических характеристик, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надёжность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колёс.

4. Консервация

- 4.1. Металлические детали тележки должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877).
- 4.2. Тележка внутрикорпусная ТВК-1 подвергнута в АО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9451-035-07614107-2006.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

5. Транспортирование и хранение

- 5.1. Транспортирование тележки должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.
- 5.2. Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°C до плюс 40°C, при относительной влажности 80 % при температуре + 25°C и при более низких температурах без конденсации влаги.
- Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6. Гарантия изготовителя (поставщика)

- 6.1. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9451-035-07614107-2006.
- 6.2. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.
- 6.3. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.
- 6.4. Предприятие - изготовитель не несет ответственности за исправность изделия и не гарантирует его работу в случаях:
- а) несоблюдения правил эксплуатации;
 - б) небрежности при хранении и транспортировке.

7 Сведения о рекламациях

7.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое,

тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44

e-mail: support@dzmo.ru, www.dzmo.ru

7.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь(сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;
- акт о консервации(если изделие находится на консервации, выполненной потребителем).

7.3 Без перечисленных материалов изготовитель не принимает рекламации. Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

7.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

7.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения изделия и номер документа, по которому оно получено;
- общее количество часов работы изделия с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок(разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

8 Сведения об утилизации

Поскольку тележка не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9 Свидетельство о приемке

Тележка внутрикорпусная

Наименование изделия

ТВК-1

Обозначение

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Сборщик / упаковщик