

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2 При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3 За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4 При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.28 помещение 34
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:

Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____

ПАСПОРТ

СТУЛ

СТ 1



РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская

по ТУ 5620-001-36725405-2015

г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

1.1 Стул предназначен для организации сидячего рабочего места в медицинских и других учреждениях.

1.2 Сиденье и спинка обтянуты винилискожей.

Стул регулируется по высоте с помощью пневматического устройства. Установлен на 5- лучевую опору с колесами или глайдерами.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	Высота до сиденья	
725-865	370	520-630	15

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование(размеры),мм.	Кол-во,шт.
3.1	Колесо мебельное/глайдеры	5
3.2	Пятилучье	1
3.3	Газовый патрон	1
3.4	Маховик М8	1
3.5	Сидение	1
3.6	Спинка	1
3.7	Ринг база	1
3.8	Паспорт	1
3.9	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направление на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Сборка должна производиться квалифицированным специалистом.

4.1 Распаковать компоненты стула.

4.2 Установить в отверстия на пятилучье колеса, вставить газ-патрон в стакан и одеть ринг базу.

4.3 Каркас спинки вставить в piaстру сидения и зафиксировать при помощи маховика. После установки спинки подтянуть шурупы крепления piaстры к сидению.

5. Условия хранения и эксплуатации.

5.1 Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».

5.2 Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.

5.3 Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.

5.4 Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.

5.5 Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

5.6 Своевременно проводить осмотр и подтяжку крепежных элементов механизмов.

ВНИМАНИЕ: Гарантийный срок не распространяется на колесные опоры и глайдеры, т.к. они являются расходниками. Неровности пола, превышение нагрузки, неравномерное распределение нагрузки может привести к износу или повреждению комплектующих. Кресло не используется для перевозки предметов и катания на нем.