

4. Правила ухода

- 4.1. Кушетка эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях с температурой воздуха от 10 °С до 35 °С и относительной влажностью воздуха до 80% при 25 °С.
- 4.2. Кушетку необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия влаги, тепла и применяемых в медицинских учреждениях растворителей, щелочей и кислот.
- 4.3. Наружные поверхности кушетки устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16.

5. Гарантийные обязательства.

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 5.2. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

Адрес изготовителя:

Россия, 603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7Г
ООО «Айболит-2000»
Тел. (831) 468-06-73
Факс (831) 417-89-98, 468-86-60

Дата изготовления _____

ОТК _____

Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил и условий эксплуатации изделие будет долго служить Вам.

**ООО «Айболит-2000»
Производство медицинской мебели**

ПАСПОРТ

КУШЕТКА
медицинская для размещения
пациентов при проведении осмотров,
физиотерапевтических и массажных
процедур
К М Ф-«Малютка-НН»
ГОСТ Р 50444-2020

ТУ 9452-001-42405834-98

г. Нижний Новгород

1. Назначение

- 1.1. Кушетка медицинская для размещения пациентов при проведении осмотров, физиотерапевтических и массажных процедур КМФ-»Малютка-НН» (в дальнейшем кушетка) предназначена для оснащения медицинских учреждений и организаций.

2. Комплект поставки.

- 2.1. Каркас кушетки с лежанкой – 1
- 2.2. Опоры кушетки – 4
- 2.3. Поперечная панель опор кушетки – 2
- 2.4. Продольная панель опор кушетки – 1
- 2.5. Опора подпятник – 8
- 2.6. Гвоздь 2х20 – 16
- 2.7. Болт мебельный М8х60 – 8
- 2.8. Гайка М8 – 8
- 2.9. Шайба гровер. – 8
- 2.10. Шайба увеличенная 8 – 8
- 2.11. Винт конфирмат 7х70 – 12
- 2.12. Заглушка конфирмата – 28
- 2.13. Ключ шестигранный – 1
- 2.14. Паспорт – 1

3. Инструкция по сборке

- 3.1. Распаковать кушетку и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
- 3.2. При помощи гвоздей (2.6) прикрепить снизу опор кушетки (2.2) опоры подпятники (2.5).
- 3.3. Установить опоры кушетки (2.2) во внутренние углы кушетки (2.1) таким образом, чтобы отверстия на каркасе кушетки совпадали с отверстиями на опорах (2.2). Зафиксируйте опоры кушетки (2.2) при помощи болтов мебельных (2.7), шайб (2.9; 2.10) и гаек (2.8), которые идут в комплекте фурнитуры.
- 3.4. При помощи винтов (2.11) прикрепить поперечные панели опор кушетки (2.3). Затем к поперечным панелям опор кушетки (2.3) при помощи винтов (2.11) прикрепить продольную панель опор (2.4). Для этого использовать шестигранный ключ (2.13).
- 3.5. Закрыть винты (2.11) заглушками (2.12).
- 3.6. Перевернуть кушетку на ножки. Кушетка готова для эксплуатации.

