

## Паспорт изделия

Стол массажный СММ-01-«Аском» (СМ.01.00), СММ-02-«Аском» (СМ.02.00), СММ-03-«Аском» (СМ.03.00), СММ-05-«Аском» (СМ.05.00)

### 1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Стол предназначен для проведения массажных, косметологических и других лечебных процедур.
- 1.2. Каркас стола изготовлен из стальных труб, окрашенных методом порошковой полимерной окраски. Изменение высоты стола производится с помощью электромеханического или гидравлического привода.
- ВНИМАНИЕ!** Изменение высоты стола нужно производить только при поднятых расширителях лежа.
- 1.3. Электромеханический привод подсоединяется к бытовой электросети напряжением 220В и частотой 50Гц., управление приводом осуществляется при помощи пульта управления (для столов с эл.приводом).
- 1.4. Для начала работы необходимо подключить штекер ножной педали, для этого необходимо выдвинуть из блока фиксатор в виде гребенки (запомнить первоначальное положение гребенки), вставить штекер ножной педали до упора в любое из свободных гнезд, совместив стрелки на блоке и штекере, далее установить фиксатор (гребенку) на место, до упора.
- 1.5. Регулировка подголовника осуществляется при помощи пневмопривода. Рычаг управления приводом расположен под подголовником.
- 1.6. Регулируемые подлокотники фиксируются при помощи резьбовых фиксаторов.

### 2. Основные технические характеристики.

2.1. Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка 250 кг

2.2. Габаритные размеры:

| Габаритные размеры, мм (max) |         |         | Масса, кг<br>не более |
|------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| Высота от пола*              | Ширина* | Длина*  |                       |
| 450-900±2%                   | 600±2%  | 2000±2% | 100                   |

\*Отклонения размеров в указанных пределах обусловлены технологией изготовления

Для обеспечения продолжительной работы электропривода **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** опускать изделие ниже отметки, указанной в п. 2.2.

Для обеспечения безопасности пациента **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** поднимать изделие выше отметки, указанной в п.2.2.

### 3.Комплект поставки.

| № п/п | Наименование (размеры, мм) | Кол-во, шт. |
|-------|----------------------------|-------------|
| 1     | Стол массажный в сборе     | 1           |
| 3     | Паспорт                    | 1           |
| 4     | Упаковка                   | 1           |
| 5     | Силиконовая смазка         | 1           |

### 4. Меры безопасности

- 4.1. Для подключения электропривода стола использовать электросеть напряжением 220В и частотой 50Гц.
- 4.2. Запрещается использование стола с поврежденным сетевым шнуром
- 4.3. Запрещается превышать максимально допустимую нагрузку 250кг.
- 4.4. Не допускать работу электропривода без перерыва более 2мин (перерыв не менее 1 мин.)
- 4.5. Запрещается регулировать высоту при наличии посторонних предметов в зоне подстоля.
- 4.6. Запрещается использовать подголовник и уширители, как опору при вставании, и место для сидения.
- 4.7. Для начала безопасной эксплуатации стола необходимо поставить стол на опоры, для этого педаль системы тормоза должна находиться в верхнем положении.
- 5. Условия хранения и эксплуатации.**
- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 50444.
- 5.2. Для очистки стола пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.3. Поверхность изделия устойчива к дезинфекции по МУ 287-113. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной 3% раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора.
- 5.4. Не допускать работу электропривода без перерыва более 2мин.
- 5.5. Не реже 1 раза в 6 месяцев производить заполнение шарнирных соединений силиконовой смазкой, а также производить визуальный осмотр изделия на предмет повреждений эл. проводов и мягких элементов стола. Периодически проверять люфт болтовых соединений и производить протяжку.
- 5.6. Для перемещения массажного стола или любых других ситуаций, которые требуют, отсоединить педаль, пульт и/или электропривод подключение и/или отключение разъемов от блока управления начинают со снятия фиксатора (гребенку) на блоке.
- 5.7. Перемещать стол через пороги разрешается только подъемом стола за раму с двух сторон, для перемещения по ровной поверхности необходимо снять стол с тормоза, нажав на педаль системы выдвижения колес до упора.

### 6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 6.2. В течение всего гарантийного срока производитель за свой счет производит ремонт или замену изделия или его отдельных компонентов.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

### 7. Предприятие производитель, свидетельство о приемке: