

**Тележка медицинская для перевозки больных с  
регулировкой высоты МЕТ ТВ-40**

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**



\* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

**Введение**

Изделие предназначено для перемещения пациентов между палатами и помещениями в больницах и других лечебных учреждениях.



Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования.

### **ВНИМАНИЕ!**

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании изделия важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

## **1. Технические характеристики**

Габариты изделия (с ручкой и поднятыми ограждениями)	201 x 74 см
Габариты ложа	198 x 63 см
Высота ложа	61 – 91 см
Угол наклона спинной секции	0 - 75°
Размер матраса	186 * 60 * 8 см
Диаметр колесных опор	200 мм
Максимальная распределенная рабочая нагрузка	160 кг

## **2. Изделие в деталях**



- 1 – Ножная секция ложа
- 2 – Спинная секция ложа
- 3 – Боковые ограждения
- 7 – Колёсное основание
- 8 – Пятое колесо

- 4 – Фиксатор положения спинной секции
- 5 – Ручка привода регулировки высоты
- 6 – Держатель для кислородного баллона
- 9 – Колеса
- 10 – Педаль системы блокировки колес

### 3. Правила эксплуатации

Не вносите изменения в конструкцию изделия и не устанавливайте на него никаких деталей, не предусмотренных производителем.

**Перед каждым использованием изделия убедитесь, что:**

- места вокруг изделия достаточно для регулировок;
- боковые ограждения беспрепятственно поднимаются и опускаются;
- механизм блокировки боковых ограждений функционирует;
- провода других приборов не попадут под колеса или в конструкцию изделия.

**В процессе эксплуатации изделия:**

- не допускайте зажимания его элементами пациента или других лиц;
- если изделие перемещается вместе с пациентом, боковые ограждения обязательно должны быть подняты и зафиксированы;
- по окончании регулировок приводите ручку винтового привода регулировки высоты в сложенное положение, чтобы избежать поломок и травм;
- во время регулировок изделия, колеса должны быть заблокированы;
- не оставляйте пациента на изделии без присмотра!



**При нарушении функционирования изделия прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.**

### 4. Техническое обслуживание и уход

- 4.1. Периодически или при необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца, проверяйте и подтягивайте ослабленные винтовые соединения, и смазывайте подвижные части.
- 4.2. Регулярно проверяйте изделие на отсутствие изношенных или поломанных деталей, следов коррозии, а также целостность покрытия.
- 4.3. Для очистки пользуйтесь мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства или 1% раствором монохлорамина ХБ. Допускается использование любых чистящим средствам на водной основе. Не допускается применение абразивных материалов и едких веществ. По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.
- 4.4. После очистки и дезинфекции протирайте изделие насухо.



Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

### 5. Транспортировка и хранение

- 5.1. Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта. При транспортировке изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
- 5.2. Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5С до +40С при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металлов.

### 6. Комплектация

- Тележка для перевозки больных – 1 шт.
- Матрац толщиной 8 см – 1 шт.

- Ремень на липучке для фиксации пациента – 2 шт.

## 7. Гарантия

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

**Гарантия не распространяется на следующие неисправности:**

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному паспорту изделия, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель \_\_\_\_\_

Срок гарантии: \_\_\_\_\_ 12 месяцев \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ м.п.

Продавец: \_\_\_\_\_

### **Информация о производителе, месте производства и гарантийном обслуживании:**

***Тележка для перевозки больных BLQ-029 с принадлежностями:  
регистрационное удостоверение РЗН 2016/4344 от 05 июля 2016 года;***

***Производитель :«Цзянсу Юнфа Медикал Экуипмент Ко., Лтд.», Кунтай, Jiangsu Yongfa Medical Equipment Co., Ltd,  
Zhaofeng Industrial Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City, China***


***Место производства: Jiangsu Yongfa Medical Equipment Co., Ltd, Changfeng village, Leyu Town, 215622 Zhangjiagang,  
Jiangsu Province, China***

***Сервисный центр: ООО «МЕТ»  
142784, Город Москва, Киевское ш. 22й км. (п. Московский), домовлад. 4, стр.2, эт.5, блок Г  
На расходные материалы гарантийные обязательства не распространяются.  
Телефон сервисной службы: (495) 775-75-95, +7 (903) 775 15 51***

# Инструкция по сборке тележки-каталки MET SILENCE




Снимите упаковку

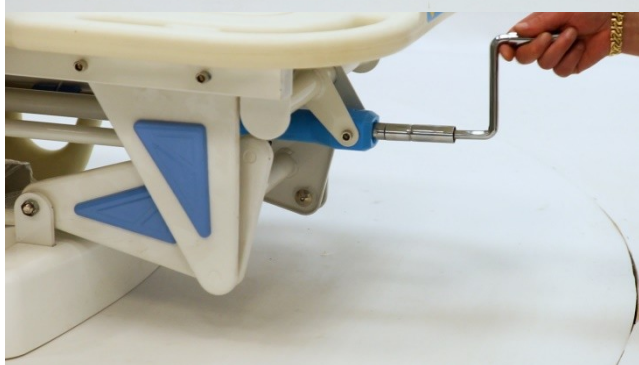

Поднимите ложе

Достаньте все детали

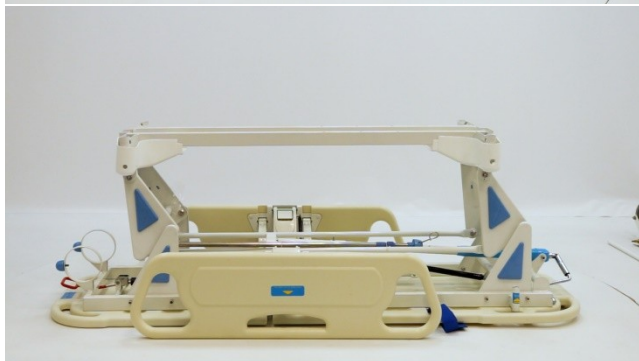


Переверните тележку






Возьмите колесо и внимательно посмотрите на стрелку.

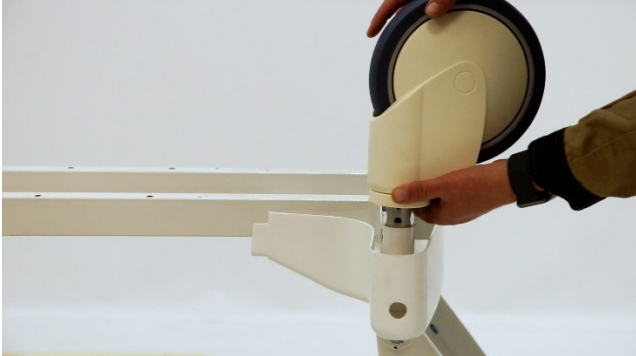

Установите колеса стрелкой против хода тележки.




Зафиксируйте колесо с помощью болта, но НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ЕГО КЛЮЧОМ.

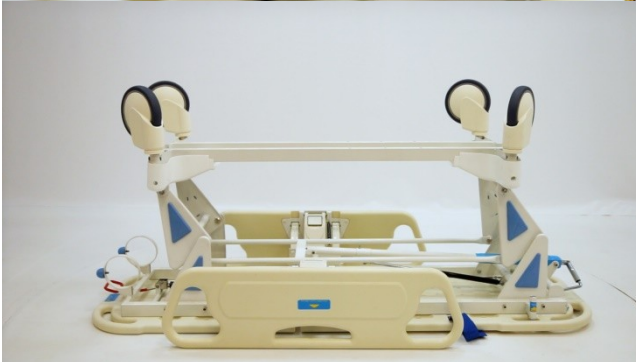

Таким же образом установите остальные колеса.



Возьмите металлический стержень с резьбой.

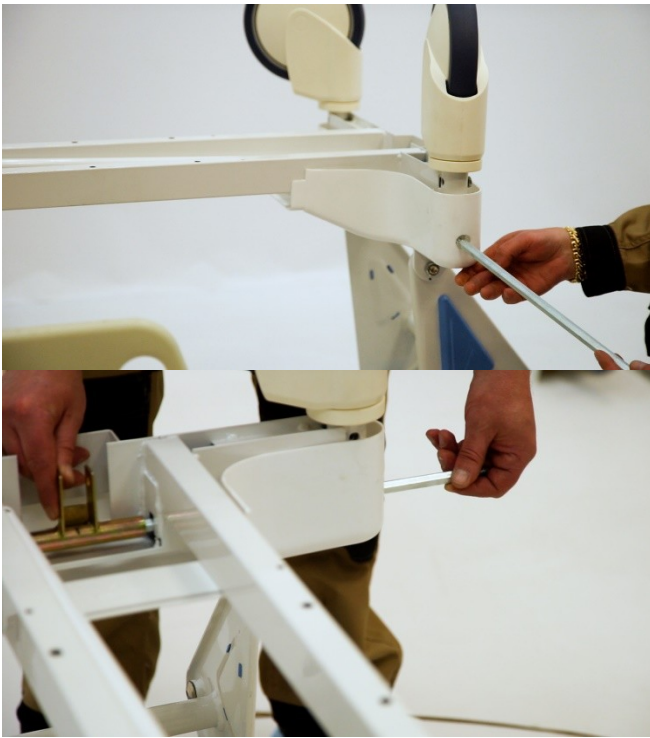

Пропустите его через задние колеса.


Расположите коннектор на стержне между колесами.  
Т.е. как только стержень пройдет через первое колесо, поднесите коннектор, чтобы стержень прошел сквозь него. Продолжайте продевать стержень через второе колесо.

Повторите те же действие для передних колес:

- возьмите металлический стержень без резьбы
- пропустите его через передние колеса
- расположите коннектор на стержне между колесами

Возьмите штангу и закрепите её на коннекторах с помощью болтов и гаек.


Для более надежного соединения используйте гаечный и шестигранный ключи.

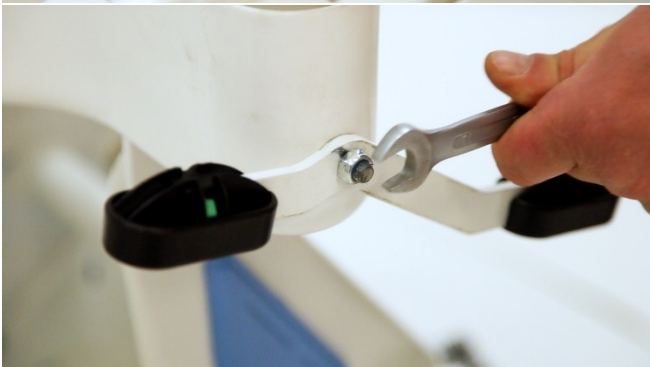

На стержень на задних колесах установите педали и закрепите их с помощью ключа и гаек.



На передние колеса установите заглушки.

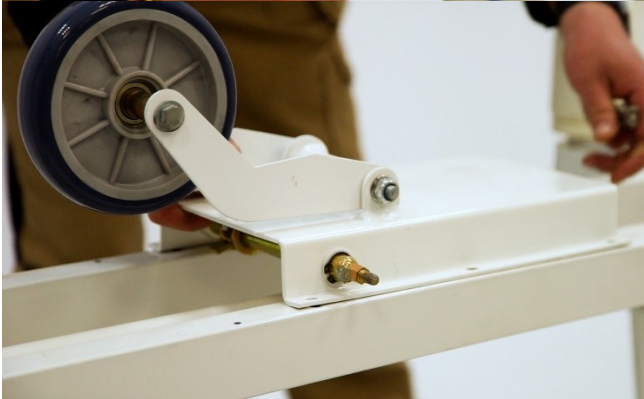

На нижнюю раму установите пятое колесо таким образом, чтобы оно выступало за платформу крепления в сторону движения. Таким образом колесо окажется в центре тележки.



Сопоставьте отверстия на платформе и раме и закрепите положение с помощью болтов и гаек. Для надежного соединения используйте гаечный и шестигранный ключи.



Переверните тележку и поставьте на колеса.



Установите защитный кожух.





Установите педали на пятое колесо.



Зафиксируйте с гайкой с помощью ключа.



Установите защитные кожухи.



Установите инфузионную стойку



Ссылка на видео по сборке тележки :  
<https://youtu.be/v7hv10bRCSA>