

ПАСПОРТ

Ветеринарный стол СВ-10-1



wiki⁺vet
СДЕЛАНО В РОССИИ

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ОПИСАНИЕ	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	5-6
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ	6
6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ	7
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ	8
9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ	8
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	9
12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА	10

Ветеринарный стол СВ-10-1

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Ветеринарный стол СВ-10-1 (далее изделие) предназначен для проведения процедур, осмотров и обследований в кабинетах и лабораториях клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений.

2. ОПИСАНИЕ

2.1. Изделие соответствует требованиям настоящего паспорта и технической документации.

2.2. Каркас изделия изготовлен из стальных профильных труб квадратного сечения с нанесением защитно-декоративной порошковой краски.

2.3. Столешница имеет V-образные детали по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств.

2.4. Материал столешницы – нержавеющая сталь.

2.5. Высота стола регулируется электроприводом. Электропривод приводится в действие от педали. Для увеличения высоты столешницы нажмите на сторону педали «UP» и удерживайте до тех пор, пока столешница не поднимется на необходимый уровень. Для уменьшения высоты стола нажмите на сторону педали «DOWN» и удерживайте пока столешница не опустится на необходимый уровень.

2.6. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технические характеристики изделия представлены в таблице ниже

Длина стола, мм	1300-1450
Ширина стола, мм	600
Высота стола, мм	500÷1000
Масса стола, кг	43±0,5
Напряжение питания сети, В	220
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	150±5

3.2. Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенной к обработке поверхностей согласно МУ 287-113 утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К работе с изделием допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной площадке.

4.3. Перед использованием необходимо убедиться в устойчивости изделия.

4.4. При эксплуатации запрещается нагружать изделие весом, превышающем значение, установленное в настоящем паспорте.

4.5. Запрещается эксплуатация неисправного изделия.

4.6. Запрещается внесение изменений в конструкцию изделия.

4.7. Не приступайте к работе при отсутствии подсоединения стола к контуру заземления.

4.8. Перед любым ремонтом отключите электропривод от сети питания.

4.9. Перед дезинфекцией отключите электропривод из сети.

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки

№	Наименование	Количество, шт	Изображение
1	Ветеринарный стол Wikivet СВ-10-1	1	
2	Миска	2	-
3	Стойка для капельницы	1	-
4	Паспорт, шт	1	-

6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

6.1. После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 2х часов.

6.2. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. После транспортировки стола, при отрицательной температуре окружающей среды, запрещается включать стол в электрическую сеть в течение пяти часов, чтобы электрооборудование успело прогреться до комнатной температуры, а сконденсированная влага могла испариться

7.2. Покрытие из нержавеющей стали допускает проведение влажной уборки. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование для уборки

хлорсодержащие растворы и моющие средства, содержащие абразивы.

ВАЖНО: средства, изготовленные на основе хлора, вызывают коррозию металлических поверхностей.

РЕКОМЕНДУЕМ следующие вещества: пероксимед, дезоксан, секусепт, перекись водорода, ПВК.

7.3. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.

7.4. Запрещается допускать на рабочую поверхность стола нагрузку, превышающую допустимую.

7.5. Обслуживание изделия включает в себя периодическую подтяжку крепежных элементов и регулирование высоты стоек (ножек) при переустановке изделия на новое место.

7.6. Температурный режим эксплуатации от +10 °С до +35 °С и относительной влажности не более 80%.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

8.1. Стол транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.2. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ без конденсации влаги.

8.3. Транспортировка и хранение стола без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность стола. Повреждения стола, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

8.4. Хранение изделия должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Стол не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

9.2. Утилизация стола осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличия гарантийного талона с отметкой торгующей организации о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

10.2. Потребитель лишается права продажи в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений изделия по вине потребителя
- при несоблюдении пунктов 4, 7, 8 настоящего паспорта.
- при отсутствии паспорта изделия и при его не правильном заполнении

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ветеринарный стол СВ-10-1

Соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации

Дата выпуска ____ / _____ /20 ____ г.

Подпись ответственного за приемку _____

**12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ)
В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Изделие
медицинской
техники Ветеринарный стол СВ-10-1
(наименование и
тип)

Серийный
номер _____

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»
155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2
Контакты: + 7 (499) 110 52 38, opt@wikizoo.ru

Дата продажи ____/_____/20
М.П. _____

г.

(подпись, штамп торгующей организации)