



ООО «Горское»

142400, Московская область, г. Ногинск,

ул. 200 лет города, дом 2

Тел: 8-800-444-06-65

e-mail: info@gorskoye.com

www.gorskoye.com

Сделано в России

ПАСПОРТ

Кресло гинекологическое-урологическое КГУ- "Горское"

по ТУ 9452-005-49894635-2011

Вариант исполнения КГУ-05.02 «Горское»



Год выпуска 2024

Кресло гинекологическое-урологическое

КГУ-05.02 «Горское»

ТУ 9452-005-49894635-201

Зав. № _____

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.02 «Горское» механическое, предназначено для проведения гинекологических, урологических и проктологических осмотров и процедур.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 2.1. Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.02 «Горское» состоит из кресла, навесных приспособлений.
- 2.2. Кресло состоит из основания (краб), на которое крепится стойка. Тип рамы - сталь с эпоксидно-порошковым покрытием.
- 2.3. Мягкие элементы кресла (спинка, сиденье) крепятся через раму на стойку.
- 2.4. Регулировка угла наклона спинки и сидения – при помощи пневмопружин.
- 2.5. На основании кресла с двух сторон крепятся:
- подколенные упоры с креплением по Геппелю, изготовлены из интегрального пенополиуретана;
 - опорные ручки для пациента широкозахватные, полиуретановые.
- 2.6. Кресло укомплектовано:
- подъемным сидением;
 - выдвижным поворотным судном из нержавеющей стали Ø 340 мм;
 - выдвижной подставкой для ног с колесными опорами;

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Масса кресла – 43 кг±5% без упаковки и 46±5% кг с упаковкой в 5-тислойный гофрокороб.
- 3.2. Габаритные размеры кресла в положении «стол»:
- длина лежа – 1350 (±20) мм;
 - ширина по фиксаторам – 700 (±10) мм;
 - ширина сиденья и спинки кресла – 560 (±10) мм.
 - высота лежа – 930 (±10) мм;
- 3.3. Размеры кресла в положении «стол», с подколенными упорами и ступенью в рабочем положении:
- длина – 1540 (±20) мм;
 - ширина – 780 (±10) мм.
- 3.4. Спинка кресла имеет угол наклона от 0° до 75°(±5°).
- 3.5. Сидение кресла имеет угол наклона от 0° до 20°(±5°).
- 3.6. Кресло выставляется в положение Тренделенбург до – 14°(±5°)
- 3.7. Кресло выдерживает равномерно-распределенную нагрузку до 180 кг.

- 3.8. Кресло транспортируется в разобранном виде.
- 3.9. Габаритные размеры упаковки: ДхШхВ = 1060 x 680 x 505 мм.

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

- 4.1. Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям технических условий ТУ 9452-005-49894635-2011 и ГОСТ Р 50444-92 (пп. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005
- 4.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
- 4.3. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт со штампом производителя и печатью продавца.

Дата выпуска:

Штамп производителя

Срок эксплуатации 6 лет

Дата продажи:

Печать организации, продавшей изделие