

ООО «Маркир»

**МАРКИР**

ооомаpкир.рф



**Стол ветеринарный СВУ-9-л  
Инструкция по сборке и эксплуатации**

Брянск, 2024

## Инструкция по эксплуатации и сборке изделия для ветеринарии

Ветеринарный стол СВУ-9-л изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 55634-2013

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации ветеринарного стола допускаются лица, внимательно изучившие инструкцию.

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Ветеринарный стол предназначен для операций и смотровых процедур с различными животными.

Условия применения: используется в ветеринарии, ветеринарных кабинетах и лабораториях

Показания к применению: для проведения процедур с животными.

Побочное действие и противопоказания: не выявлены.

1.2. Ветеринарный стол эксплуатируется при температуре окружающей среды от +10°C до +40°C при относительной влажности 45-70%.

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры ветеринарного стационара указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Габаритные размеры ( $\pm 10$ мм)	Значение
Длина, мм	1350 $\pm 10$ мм
Ширина, мм	600 $\pm 10$ мм
Высота, мм	600 -1100
Вес, кг	57
Максимальная нагрузка на стол, кг	150

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 2.

Таблица 2.

Функциональные размеры ( $\pm 10$ мм)	Размеры ( $\pm 10$ мм)
Регулировка стола по высоте	600-1100 мм
Регулировка рабочей поверхности	45°

#### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки стола соответствует указанному в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.
1	Электропривод	1
2	Пульт управления электропривода	1
3	Поворотные опоры	4
4	Лотки	1
5	Держатель капельницы	1
6	Вилка с сетевым проводом для подключения питания стола	1
7	Инструкция по эксплуатации и сборке	1


#### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Ветеринарный стол изготовлен из металлической сварной жесткой конструкции.
- 4.2. Ветеринарный стол поставляется в собранном виде- готовом к работе.
- 4.3. Данный стол оснащен электроприводом с рабочим напряжением 220В.
- 4.4. Рабочая столешница стола изготовлена из нержавеющей стали + усиленная ЛДСП.

#### 5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

**ВНИМАНИЕ! СТОЛ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ ,В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ К РАБОТЕ!**

- 5.1. Распаковать стол, проверить на отсутствие повреждений.  
Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки комплектующей ведомости, определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки.
- 5.2. Стол устанавливается на ровном полу.
- 5.3. На столе проверить крепление болтовых соединений, узлов и агрегатов.
- 5.4. После визуального осмотра, убедившись в целостности и комплектности ветеринарного стола, подключить к сети 220В и проверить рабочий ход электропривода.

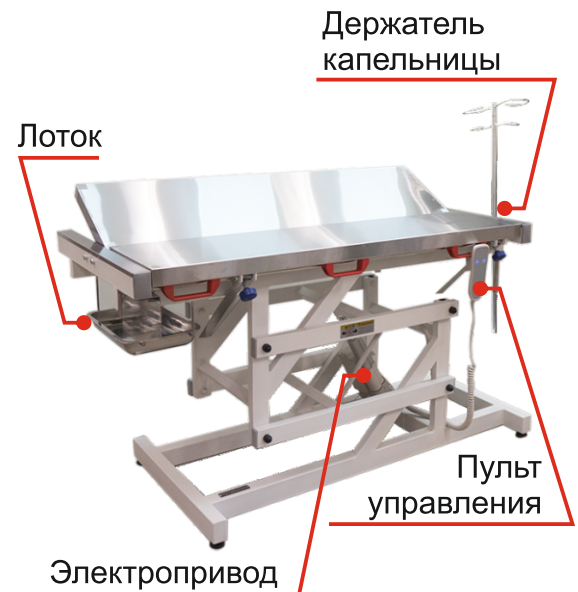

#### 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом (отверткой).
- 6.2. Ветеринарный стол, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, щелочами, моющими средствами.

#### 7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 7.1. Транспортировка ветеринарной мебели должна производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
- 7.2. Размещение и крепление упаковок с ветеринарной мебелью в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.
- 7.3. Ветеринарная мебель предназначена для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.
- 7.4. Сохранность и продолжительность эксплуатации ветеринарной мебели зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и в значительной степени, от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Нормальные условия для хранения и эксплуатации мебели – температура воздуха от +10°C до +40°C при относительной влажности 45-70%.  
Рекомендуется: удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку дезинфицирующими средствами способом протирания.  
Не допускается: механическое повреждение деталей ветеринарной мебели и попадание на их поверхность влаги и растворителей; хранение в сырых неотопливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие прямых солнечных лучей.

## **8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ветеринарного стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода ветеринарного стола в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие, или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

## **9. УТИЛИЗАЦИЯ**

9.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

## 9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
наименование и тип изделия

---

дата выпуска

**Предприятие-изготовитель: ООО «Маркир»**

Юридический адрес: 241050, г. Брянск, ул. Республиканская, 14

Место производства: г. Брянск, ул. Красноармейская, 103

Тел.: +7 (4832) 74-00-74

E-mail: [firmtabl@yandex.ru](mailto:firmtabl@yandex.ru)