

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений подставка поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплектовочной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

Гарантийные обязательства.

1. Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям технических условий ТУ 32.50.50-003-91587838-2017, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
- 3 Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт со штампом производителя и печатью продавца.

Дата

Штамп производителя

Срок эксплуатации 6 лет

Дата продажи

Печать организации, продавшей изделие

ООО «Горское»

142400, г. Ногинск Московская область, ул. 200 лет города, дом 2

Тел: 8-800-444-06-65 e-mail: info@gorskoye.com

Паспорт

Подставка под таз с двумя тазами
ТУ 32.50.50-003-91587838-2017
№ РЗН 2017/6340 от 02.11.2020г.



Год выпуска 2023г

Назначение изделия:

Подставка под таз в комплекте с двумя тазами служит для сбора медицинских отходов и используется при оснащении перевязочного и процедурного кабинета, на постах медицинских сестер.

Технические характеристики:

Подставка под таз в комплекте с двумя тазами изготовлена из стального профиля прямоугольного сечения и круглой трубы, покрытых экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской белого цвета, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов. Верхняя часть подставки изготовлена из трубы круглого сечения с порошковым полимерным покрытием.

Подставка установлена на регулируемые резьбовые опоры.

Тазы изготовлены из нержавеющей стали.

Габаритные размеры, мм:

Диаметр таза 340 ± 3

Глубина таза 110 ± 3

Диаметр четырехлучевого основания 550 ± 10

Высота изделия 900 ± 10

Объем таза – 5,3 л

Масса, кг – 3,7

Изделие упаковано в четырехклапанный гофрокороб из 3-слойного картона.

Габаритные размеры с упаковкой, мм:

Д x Ш x В = 920 x 455 x 145 мм

Масса (с упаковкой), кг – 4,3

Характеристики для транспортировки:

Объем, м. куб. – 0,06 м³

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1.

Правила хранения, транспортировки и эксплуатации мебели:

1. Транспортировка подставки на значительные расстояния осуществляется в заводской упаковке, автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учётом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

- упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20° до $+40^{\circ}\text{C}$.

2. Изделие может храниться только в упаковке в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от 0° до $+40^{\circ}\text{C}$.

- относительная влажность при температуре окружающей среды $+25^{\circ}$ не более 80%

- отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

3. Номинальная нагрузка на изделие не более 20 кг.

Комплектовочная ведомость:

Деталь/комплектующее	Кол-во	Перечень метизов	Кол-во
Четырехлучевая опора	1 шт.	Шайба 8	2 шт.
Стойка	1 шт.	Винт с цилиндр. головкой и шестигранным углублением под ключ М8х20 мм	2 шт.
Кронштейн установочный	1 шт.	-	
Таз	2 шт.	-	
Опора резьбовая (регулир.)	4 шт.	-	
Паспорт изделия	1 шт.	-	

Инструкция по сборке:

1. Установить стойку в центральную втулку четырехлучевого основания и закрепить крепежом (винт, шайба), посредством ключа Имбуса (6 мм).

2. Установить кронштейн установочный на стойку и закрепить его крепежом (винт, шайба).

3. Вставить тазы в кронштейн установочный.

4. Отрегулировать резьбовые опоры для устранения неровностей пола.