


СХЕМА СБОРКИ

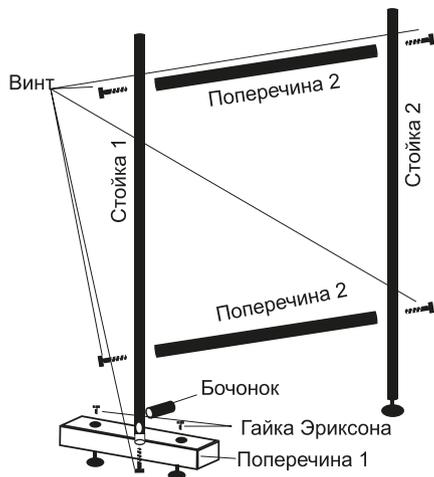

1. Снимите упаковку с изделия.
2. Извлеките из пакета комплектующие (винты, гайку Бочонок, гайки Эриксона, колеса или ножки, ключ).
3. Начиная сборку с поперечины 1 или стойки 1.
4. Закрутите колеса или ножки в поперечине 1 при помощи гаек Эриксона.
5. Вставьте гайку Бочонок в отверстие стойки 1, вставьте стойку в отверстие в поперечине 1 и зафиксируйте конструкцию при помощи винта 1.
6. Прикрутите две поперечины 2 к образовавшейся конструкции.
7. Наденьте на поперечины 2 экран ширмы.
8. Прикрутите к стойке 2 колесо или ножку.
9. Прикрутите стойку 2 к поперечинам с экраном.
10. Затяните с достаточным усилием все винты.

Комплектующие:

Винт – 5 шт.
Гайка Бочонок – 1 шт.
Гайка Эриксона – 2 шт.
Колесо/ ножка – 3 шт.
Ключ – 1 шт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Оборудование транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ Р 504444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования оборудования – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
Оборудование должно храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Наружные поверхности оборудования должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с требованиями МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% р-ром хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 24 месяцев при соблюдении правил хранения и эксплуатации.
Начало гарантийного срока исчисляется со дня приобретения изделия конечным потребителем, но не позднее полугода с даты изготовления.
Замечания о дефектах, обнаруженных во время эксплуатации изделия, а также пожелания по усовершенствованию его конструкции, просим сообщать по почте: medsnab2011@yandex.ru

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ОО «Медснаб-Груп»



Г.Э. Хайрулин

«04» марта 2019 г.

ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ДЛЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ

«МСГ»

по ТУ 9452-001-56718502-2012
Р.У. № ФСР 2012/13719



Производитель ООО «Медснаб-Груп»,
Россия, 141112, Московская обл., г. Щёлково, тер. Комплекс Жегалово, стр. 12,
помещ. 4

СОДЕРЖАНИЕ

Ширмы медицинские.....	
Схема сборки.....	
Транспортировка и хранение.....	
Чистка и дезинфекция.....	
Гарантийные обязательства.....	

Оборудование медицинское «МСГ», предназначено для использования в процедурных кабинетах, реанимационных палатах, на постах медсестер и др. кабинетах медицинских учреждений.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий.

Перечень видов и исполнений оборудования выпускаемый ООО «Медснаб-Груп»:

ШИРМЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Масса одной секции не более 3 кг.
Средний срок службы ширмы 8 лет.

ОДНОСЕКЦИОННЫЕ ШИРМЫ

Ширма медицинская стационарная ШМ-01-«МСГ» без колес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 740 мм.
Высота: 1760±10 мм.
Наличие колес: без колес.
Полотнище: ПВХ.

Ширма медицинская стационарная односекционная ШМ-01-«МСГ» изготовлена из стальной профильной трубы с полимерным покрытием. Ширма медицинская стационарная односекционная ШМ-01-«МСГ» выпускается на регулируемых опорах. Полотнище ширмы изготовлено из пленки ПВХ, легко поддается обработке.



Ширма медицинская передвижная ШМ-01П-«МСГ», на колесах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 740 мм.
Высота: 1800±10 мм.
Наличие колес: на колесах.
Диаметр колес: 40 мм.
Полотнище: ПВХ

Ширма медицинская передвижная, односекционная, на колесах ШМ-01П-«МСГ» изготовлена из стальной профильной трубы с полимерным покрытием. Ширма медицинская односекционная ШМ-01П-«МСГ» выпускается на колесах. Полотнище ширмы изготовлено из пленки ПВХ, легко поддается обработке.

