



ОКПД2 32.50.13.190
ТУ 9437-013-52777873-2014
Рег. уд. № РЗН 2015/2746 от 27.07.2020г.

ООО «МЕДПЛАНТ»

Набор акушерский
для оказания скорой медицинской помощи
НАСМП-02-«МЕДПЛАНТ»
ТУ 9437-013-52777873-2014

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЛКЯМ.942439.005РЭ

Ver.007

ООО «МЕДПЛАНТ»
Адрес: 109316, г.Москва, пр-т Волгоградский, д.42, корп.5, эт.2, пом.І, ком.296-318
Телефон: 8 (495) 223-6016
e-mail: medplant@medplant.ru

Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

Сделано в России

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение.....	1
2. Область применения.....	1
3. Условия применения.....	1
4. Основные технические характеристики.....	1
5. Комплект поставки.....	1
6. Описание изделия.....	2
7. Подготовка к работе и правила работы с укладкой.....	2
8. Транспортирование, хранение и уход.....	4
9. Показания и противопоказания к применению медицинского изделия.....	4
10. Указания по утилизации.....	4
11. Гарантии производителя.....	4
12. Контактная информация производителя	4
13. Свидетельство о приёмке	5
Перечень вложений укладки.....	5

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи НАСМП-02-«МЕДПЛАНТ»:

Наименование	Артикул
В сумке медицинской универсальной СМУ-02	
В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	

Соответствует ТУ 9437-006-52777873-2010 и признан годным для эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу укладки, что поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЛОЖЕНИЙ УКЛАДКИ:

Таблица 2

№	Наименование медицинского изделия	Кол-во, не менее
1	Воротник-шина шейная для новорожденных (либо комплект шин, либо бандаж)	2 шт.
2	Глазная повязка сорбиционная стерильная (не менее 55 мм x 70 мм)	2 шт.
3	Грелка	2 шт.
4	Зажим Кохера	2 шт.
5	Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый	1 шт.
6	Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой	1 шт.
7	Зажим пуповины (скобы для пуповины)	6 шт.
8	Игла атравматическая	1 шт.
9	Иглодержатель общехирургический	1 шт.
10	Катетер для отсоса слизи с фильтром или спринцовка резиновая	2 шт.
11	Комплект акушерского белья для роженицы и новорожденного	2 компл.
12	Комплект одежды хирургической одноразовой	2 компл.
13	Пинцет стерильный	2 шт.
14	Скальпель стерильный одноразовый	2 шт.
15	Стетоскоп акушерский деревянный	1 шт.
Прочие средства		
16	Одеяло байковое детское	2 шт.

Примечания: Изделия пп. 1,2, 7, 8, 11-14 являются одноразовыми, повторному использованию они не подлежат.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УХОД

8.1. Транспортирование укладки может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 75 % при 15 °С.

8.2. Укладки могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности 60% при 20 °С.

8.3. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте хранение в неотапливаемых машинах и других неотапливаемых помещениях.

9. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Показаниями к применению медицинского изделия являются ситуации оказания скорой медицинской помощи в области акушерства. Противопоказания, при правильном применении медицинского изделия, отсутствуют. Показания, противопоказания для комплектующих входящих в набор – согласно их инструкциям по применению.

10. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сумки, рюкзак и футляры-саквояжи относятся к медицинским отходам класса «А». Они утилизируются стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения укладки утилизируются согласно их эксплуатационных документов.

11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

11.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

11.2. Гарантии распространяются на изделия производства ООО «МЕДПЛАНТ» (сумки, футляры-саквояжи, рюкзаки, вложения) и не распространяются на вложения производства сторонних организаций (перевязочные и расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия).

11.3. Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего документа, копий товарной накладной, счета-фактуры, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках. Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов. В случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

11.4. В случае несоблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, повлекших за собой неблагоприятные последствия для пациента, **ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!**

11.5. Рекламации направлять на адрес производителя

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.І, ком.296-318.

Телефон: 8 (495) 223-6016

e-mail: medplant@medplant.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи НАСМП-02-«МЕДПЛАНТ» предназначен для оказания скорой медицинской акушерской помощи.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, другие медицинские учреждения.

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Полевые условия, на дому, в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях, передвижных комплексах, автомобилях медицинской помощи

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры упаковок приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Параметр \ Серия	В сумке медицинской универсальной СМУ-02	В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2
Габаритные размеры, мм	(530х260х260) ±50	(440х252х340) ±50
Масса укладки (не более), кг	5	5,9
Номинальная нагрузка (не более), кг	12	12

Средний срок службы: не менее 3 лет, при своевременном восполнении израсходованных вложений.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +40 °С

- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25 °С.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сумка медицинская универсальная СМУ-02 или Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 – 1 шт;

2. Комплект вложений – 1 компл. (согласно. табл. 2);

3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Плечевой ремень для УМСП-01-Пм/2;

2. Столик манипуляционный для УМСП-01-Пм/2.

Примечание: Количество принадлежностей в комплекте поставки согласовывается с заказчиком.

6. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи НАСП-02-«МЕДПЛАНТ» представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному медицинскому персоналу оказывать скорую помощь на догоспитальном этапе всем категориям пациентов. Набор выпускается в сумке медицинской универсальной СМУ-02 или в футляре-саквояже УМСП-02-Пм/2.

Сумка медицинская универсальная СМУ-02

Изготовлена из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ 420Д, дно сумки изготовлено из непромокаемого тентового материала, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию сумки. Для защиты вложений от механических повреждений, в стенках сумки находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из полирекса НПЭ. Для размещения вложений сумка имеет 3 кармана, основной отсек и отсек для хранения документов. На внешней части сумки расположен держатель для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и эмблема красного креста. По периметру корпуса сумки расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток. Для удобства переноски сумка снабжена двумя ручками (для ношения одной рукой) и плечевым ремнём, со специальной накладкой, которая предохраняет его от сминания.

Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2

(ТУ 9437-006-52777873-2010)

Адаптирован к данному набору. Футляр изготовлен из холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки для размещения вложений. Створки крепятся ко дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому набора.

На верхней поверхности футляра имеется окно для информационной таблички, эмблема красного креста и светоотражающая полоса для обеспечения безопасной работы в темное время суток. Футляр надёжно защищает элементы набора от повреждений и легко обрабатывается, поэтому набор в футляре особенно удобен для частого использования.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА РАБОТЫ С УКЛАДКОЙ

7.1. Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки. Перед началом работы с набором изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.

7.2. Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в состав укладки.

7.3. Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 имеет жёсткий каркас и защищает элементы укладки от повреждений. Однако, при транспортировке укладки и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов укладки и нарушению стерильности вложений. Избегайте воздействие острых предметов на сумку и рюкзак при их использовании. Чтобы исключить повреждение изделий не нагружайте их более чем на 12 кг. Бережное отношение и аккуратная работа с укладкой продлевает срок ее службы.

ВНИМАНИЕ!

● Не используйте укладку, если вы не имеете достаточной квалификации!

7.4. После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в футляр. Загрязнённое имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в специально предусмотренные отсеки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств и в случае их использования укладку необходимо пополнить. Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат.

ВНИМАНИЕ!

● Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат!

7.5. Дезинфекцию, при необходимости, рекомендуется проводить 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Марлевым тампоном, смоченным в растворе, легким нажатием потереть в прямом и обратном направлениях.

7.6. При поломке тяги в футляре-саквояже замените её с помощью рем. комплекта, входящего в состав футляра, как показано на Рисунке 1.

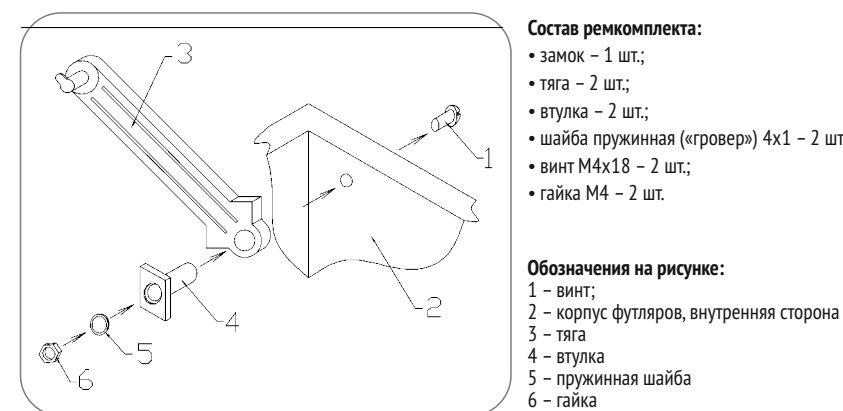


Рис. 1 Замена тяги футляра-саквояжа УМСП-01-Пм/2 с использованием ремонтного комплекта

7.7. Сумки самостоятельному ремонту не подлежат.