

7. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Срок гарантии: _____

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____



Штабелируемая инфузионная стойка – штатив MET FO-180



1. Назначение изделия

Инфузионная стойка - штатив медицинский для вливаний (далее по тексту — штатив) предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур.

Штатив изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. Технические характеристики

Диапазон высоты, мм	1380 - 2375
Диаметр основания, мм	535
Вес	6 кг

Штатив выдерживает нагрузку массой не более 10 кг.
Поверхность штатива устойчива к дезинфицирующим средствам

3. Комплектация и принцип работы

- Основание на колесах
- Телескопическая стойка
- Четыре крючка для инфузионных пакетов
- Каплесборник
- Держатели флаконов (опция)

Основание и стойка штатива изготовлены из нержавеющей стали.

Стойка представляет собой телескопическую систему в виде двух труб, которая фиксируется с помощью винтового зажима. Это позволяет установить флаконы на требуемую высоту.

Держатель и неметаллические детали винтового зажима изготовлены из химически стойкого нетоксичного пластика.

4. Указания по эксплуатации и технике безопасности

- К сборке и эксплуатации штатива допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию изделия и правила эксплуатации.
- После транспортирования штатива в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- Распаковать штатив и проверить целостность покрытия.
- Проверить комплектность.

5. Техническое обслуживание

Штатив для вливаний не требует специального технического обслуживания. Рекомендуется периодически, 1 раз в 6 месяцев, производить проверку затяжки болтовых соединений и в случае их ослабления, производить их подтяжку.

6. Правила транспортирования и хранения

- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.
- Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.