

# ПАСПОРТ

## Тележка-носилки ветеринарные



wiki<sup>+</sup>vet  
СДЕЛАНО В РОССИИ

2022г.



## Оглавление

НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
ОПИСАНИЕ .....	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	5
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	5
КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	6
УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ .....	7
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	8
ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ .....	8
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ .....	9
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	9
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	10
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА .....	10
СХЕМА СБОРКИ .....	111

## Тележка-носилки ветеринарные

### НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка-носилки ветеринарные (далее изделие) предназначен для фиксации и перемещения животных в условиях ветеринарной клиники и на выезде.

### ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует требованиям настоящего паспорта и технической документации.

Каркас изделия изготовлен из стальных профильных труб квадратного сечения с нанесением защитно-декоративной порошковой краски.

Верхняя часть - носилки, их можно снять и взять с собой на выезд, затем установить обратно вместе с пациентом.

Покрытие носилок обладает высокой устойчивостью к повреждениям, легко очищается, устойчиво к любым дезинфицирующим средствам

Колёса оснащены стопорами.

Изделие поставляется в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики изделия представлены в таблице ниже

Длина, мм	1200
Ширина, мм	500
Высота, мм	800
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	100±5

Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенной к обработке поверхностей согласно МУ 287-113 утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке изделия допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

Изделие должно собираться и эксплуатироваться на горизонтальной площадке.

Перед использованием необходимо убедиться в устойчивости изделия.

При эксплуатации запрещается нагружать изделие весом, превышающем значение, установленное в настоящем паспорте.





Запрещается эксплуатация неисправного изделия


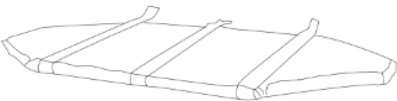


Запрещается внесение изменений в конструкцию изделия

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поставляется в разобранном виде в составе

№	Наименование	Количество, шт	Изображение
1	Опоры на колёсах	2	
2	Рама нагрузная	1	
3	Затяжка	1	
4	Кронштейн	1	

5	Носилки	1	
6	Подушка-накладка	1	
7	Штатив	1	
7	Болт М8х20	2	
8	Паспорт	1	-
9	Схема сборки	1	-

### УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 2х часов.

Распаковать изделие и проверить целостность покрытия и проверить комплектность.

Собрать изделие согласно схеме сборки.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.

Запрещается допускать на рабочую поверхность изделия нагрузку, превышающую допустимую.

Обслуживание изделия включает в себя периодическую подтяжку крепежных элементов и регулирование высоты стоек (ножек) при переустановке изделия на новое место.

Температурный режим эксплуатации от +10 °С до +35 °С и относительной влажности не более 80%.

## ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Изделие транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре -50 °С до +50 °С без конденсации влаги.

Транспортировка и хранение изделия без упаковки завода-изготовителя не гарантирует его сохранность. Повреждения изделия, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Хранение изделия должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80%, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

## ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Стол не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация стола осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии гарантийного талона с отметкой торгующей организации о дате продажи.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

Потребитель лишается права продажи в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений изделия по вине потребителя
- при несоблюдении пунктов правил настоящего паспорта
- при отсутствии паспорта изделия и при его не правильном заполнении

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

**Тележка-носилки ветеринарные** соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации

Дата выпуска \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20 \_\_\_\_ г.

Подпись ответственного за приемку \_\_\_\_\_

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие  
медицинской  
техники **Тележка-носилки ветеринарные**  
(наименование  
и тип)

Производитель: ООО «ТД Технотек»  
115580, город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 5 корпус 5, э 1  
пом 884 к 1 оф 24  
Контакты: + 7 (499) 110 52 38, [opt@wikizoo.ru](mailto:opt@wikizoo.ru)

Дата продажи \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20 \_\_\_\_ г.

М.П. \_\_\_\_\_

(подпись, штамп торгующей организации)

## СХЕМА СБОРКИ

