

ООО Производственное предприятие «Ока-Медик» 607100, г. Навашино
Нижегородская обл. ул. Дорожная 13. т. 8(83175) 5-54-84;5-65-15.

Талон №
На гарантийный ремонт Кровать для новорожденных КН «Ока-Медик» .

Продан
(дата изготовления) наименование


торгующего предприятия

М П Торгующего предприятия
(подпись продавца)

Владелец и его адрес

(подпись)

(дата заполнения)

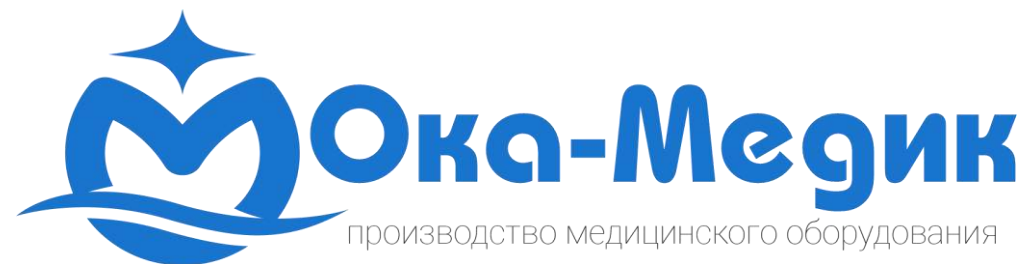

ООО «Производственное предприятие Ока-Медик»

**Кровать для новорожденных КН-«Ока-Медик»
по ТУ 9452-008-70373441-2008**



Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015)

607100, г. Навашино, Нижегородской области,

ул. Дорожная, 13

8(83175) 5-54-84,5-65-15

OkaMedik2006@yandex.ru

okamedik.ru

1. Назначение

Кровать для новорожденных КН «Ока-Медик» (далее по тексту кровать), предназначена для размещения новорожденных детей в родильных домах или детских лечебных учреждениях.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры кровати составляют:

- длина – 775 ± 30 мм;
- ширина – 470 ± 30 мм;
- высота – 980 ± 30 мм.

2.2 Масса кровати должна быть не более 12 кг.

2.3 Угол наклона ванны кюветы от горизонтали -- ± 12 градусов.

Примечание: при заказе кровати с колёсами отличными от базовых (d.75мм) габаритные размеры изменятся на разницу между размерами колёс.

2.4 Средний срок службы кровати до списания должен быть не менее 5 лет.

2.5 За критерий предельного состояния кровати принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим или функциональным показателям.

3. Комплектность

3.1 Комплектность поставки кровати должна соответствовать указанному в таблице 1

Таблица 1

№	Наименование	Количество, Шт.
1	Кровать для новорожденных КН-1 «Ока-Медик»	1
2	Ванна-кювета	1
3	Матрац	1
4	Паспорт	1

4. Устройство, подготовка и порядок работы.

4.1. Кровать для новорожденных состоит из основания установленного на четыре колеса (два из которых с тормозом), рамки в которую укладывается кювета с матрасиком и регулировочного механизма угла наклона ванны кюветы.

4.2. Порядок сборки кровати КН. Распакуйте набор деталей и очистите их от упаковочного материала. Приверните колеса как показано на рисунке и надежно закрепите их. Возьмите кювету, очистите её от упаковочного материала и поставьте её на место в держатель кюветы.

4.3. Для подготовки к работе, распакуйте кроватку и очистите её от упаковочного материала. И удалите антикоррозионную смазку, протираяем насухо тампоном из марли, смоченную спиртом, проведите техническое обслуживание согласно пункту 5 паспорта. Выполните санитарную обработку.

4.4. Запрещается использование неисправной кровати. Во избежание повреждений и опрокидывания кровати избегайте резких рывков или ударов кровати при её перемещении.

4.5. В связи с усовершенствованием изделия, его конструкция может незначительно отличаться от приведенной в паспорте.

5. Техническое обслуживание и сведения о консервации и упаковке.

5.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (периодичность раз в год) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, проверке целостности колес, замене при необходимости годными деталями поломанных или изношенных и санитарной обработке кровати.

5.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования кровати, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых, сломанных, изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежности крепления всех резьбовых соединений, вращение колес вокруг своей оси и вокруг вертикальной оси.

5.3 Кровать в упаковке изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от - 50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 98% при 25°C , воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Столик в упаковке изготовителя может транспортироваться на любом виде закрытого транспорта.

5.4 Срок хранения без переконсервации – 3 года.

6. Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях.

6.1 Гарантийный срок эксплуатации кроватей-1 год со дня продажи.

6.2 В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет кровать или её части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлению гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией с заявкой на ремонт (замену), с указанием адреса, где находится изделие, номера телефона. Рекламации на столик и его части, подвергнутые ремонту у потребителя (в гарантийный срок) не удовлетворяются.

7. Свидетельство о приемке.

Кровать для новорожденных КН «Ока-Медик» .

(число, месяц, год)

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией ТУ 9452-008-70373441-2008 и признан для эксплуатации.

Контролер ОТК.

(личная подпись)

Мастер (нач. цеха)

(личная подпись)

