



ООО «Производственное предприятие Ока-Медик»

**Кровати медицинские «Ока-Медик»
по ТУ 9452-013-61346965-2011, вариант исполнения: Кровать
медицинская функциональная трехсекционная с механическим
регулированием углов наклона секций КМФ3-01 «Ока-Медик»**



Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015)

607100, г. Навашино, Нижегородской области,

ул. Дорожная, 13

8(83175) 5-54-84,5-65-15

Okamedik2006@yandex.ru

okamedik.ru

1. Назначение изделия.

- 1.1. Кровать предназначена для лечебно-профилактических учреждений.
- 1.2. Кровать изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. Технические характеристики.

- 2.1. Основные параметры и размеры кровати.
 - 2.1.1. габаритные размеры, мм – 2150x880x1000
 - 2.1.2. размеры подматрачной рамы, мм – 2000x800.
 - 2.1.3. количество секций – 3.
 - 2.1.4. угол наклона секции относительно горизонтальной поверхности, град, не менее:
 - спинной – 60;
 - тазобедренной – 30;
 - ножной - 30.
 - 2.1.6. Масса, кг, не более – 60 .
- 2.2. Кровать выдерживает равномерно-распределенную нагрузку массой не более 150 кг.
- 2.3. Усилие, прилагаемое к рукояткам механизмов для изменения углов наклона секций - не более 150 Н.
- 2.4. Кровать имеет 4 колеса диаметром 125 мм, вращающиеся вокруг вертикальной оси; 2 колеса имеют индивидуальные тормоза.
- 2.5. Усилие перемещения кровати - не более 200 Н (20 кг), при этом колеса кроватей должны быть сориентированы в направлении движения.
- 2.6. Усилие включения тормоза колес – не более 150 Н (15 кг).
- 2.7. Каркас имеет защитно-декоративные покрытия эпоксидной порошковой краской типа «Эколак» по ТУ 2329-382-02068474, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
- 2.8. Покрытия металлических изделий соответствуют требованиям IV класса ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.
- 2.9. Кровать устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12, 1998 года.
- 2.10. Средний срок службы кровати до списания – 5 лет.

3. Комплектность.

- 3.1. Комплектность приведена в таблице 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт
1	Кровать (без съемных приспособлений)		1
Съемные приспособления			
2	Комплект боковых ограждений		1
3	Приспособление для подтягивания		1
4	Корзина под судно		1
5	Штатив телескопический		1
6	Матрац пенополиуретановый		1

Съемные приспособления поставляются отдельно по усмотрению заказчика.

- 3.2. Комплект поставки кроватей без съемных приспособлений:

- 3.2.1.1. подматрачная рама – 1 шт.
- 3.2.1.2. спинка кроватная – 2 шт.
- 3.2.1.3. болт М8х20(25) – 4 шт.
- 3.2.1.4. шайба плоская 8 – 4 шт.
- 3.2.1.5. шайба-гравёр 8 – 4 шт.
- 3.2.2. колесо ф125 с тормозом – 2 шт.
- 3.2.3. колесо ф125 без тормоза – 2 шт.
- 3.2.4. болт М10х40(45) – 4 шт.
- 3.2.4.1. гайка М10 – 4 шт.
- 3.2.4.2. паспорт – 1 шт.

11. Свидетельство о приемке.

Кровать медицинская функциональная трехсекционная КМФ3-01

Дата выпуска _____
(число, месяц, год)

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией ТУ9452-013-61346965-2011, и признан годным к эксплуатации.

Контролер ОТК Мастер (нач. цеха)

(личная подпись) (личная подпись)
М.П.

ООО Производственное предприятие «Ока-Медик» 607100 ,г. Навашино
Нижегородская обл. ул. Дорожная 13. т. 8(83175) 5-54-84;5-65-15.

Талон №

На гарантийный ремонт на Кровать медицинская функциональная
трехсекционная КМФ3-01

Продан _____

(дата изготовления)

наименование

Продан _____
(Название торгующего предприятия)

МП Торгующего предприятия _____
(подпись продавца)

Владелец и его адрес _____

(подпись)

(дата заполнения)

4. Устройство и принцип работы.

- 4.1. Базовая конструкция кровати (без съемных приспособлений) состоит из подматрачной рамы, кроватных спинок и крепежных элементов. Каркасы кровати и секций выполнены сварными из стальных профильных труб прямоугольного сечения. Ложе выполнено из перфорированного стального листа или металлической сварной сетки.
- 4.2. Спинки кроватные выполнены сварными из стальных труб круглого сечения.
- 4.3. Кровать имеет 4 поворотных колеса, 2 из которых имеют индивидуальные тормоза. Колеса крепятся к ножкам спинок болтами.
- 4.4. Кровать имеет три подъемных секции, позволяющих изменять положение тела больного или придавать ему наиболее удобное положение. Изменение угла подъема секций осуществляется вручную при помощи ступенчатых механизмов регулировки.

5. Эксплуатация и меры безопасности.

- 5.1. К эксплуатации кровати допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию кровати.
- 5.2. При подъеме и опускании секций подматрачной рамы необходимо пользоваться специальными ручками, установленными с двух сторон каждой секции. Следите за тем, чтобы кисть руки не попала между рамой и секцией.
- 5.3. Рекомендуем производить подъем и опускание секций кровати двум медработникам, по одному с каждой стороны.
- 5.4. Перемещение кровати по полу на колесах производить только с опущенными тормозами.
- 5.5. Запрещается эксплуатация кровати в следующих случаях:
 - 5.5.1. если нагрузка на кровать превышает допускаемую;
 - 5.5.2. если не исправны колеса или тормоза;
 - 5.5.3. если погнуты ножки спинок или другие части кровати;
 - 5.5.4. если не исправен фиксатор механизма подъема какой-либо секции.

6. Подготовка к работе.

- 6.1. После транспортировки кровати в условиях отрицательных температур перед распаковкой необходимо выдержать её при комнатной температуре не менее 2-х часов.
- 6.2. Для подготовки к работе распакуйте кровать, проверьте комплектность, очистите кровать от упаковочного материала.
- 6.3. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. Порядок сборки.

- 7.1. Перед работой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего описания.
- 7.2. Необходимо привернуть колеса (поз.6 и 7) с помощью болтов (поз.8) и гаек (поз.9) к ножкам спинок кроватных (поз.2) - см. рис.1, вид Б. Рекомендуется колеса с тормозом (поз.6) разместить по диагонали кровати.
- 7.3. Привернуть спинки кроватные (поз.2) к каркасу подматрачной рамы (поз.1) при помощи болтов (поз.3) и шайб (поз.4 и 5) – см. рис.1, вид А.
- 7.4. Перед началом эксплуатации проверить надежность крепления всех узлов кровати, затяжку всех болтовых соединений, работоспособность механизма подъема головной секции.
- 7.5. Установить кровать на место. Проверить действие тормозов на колесах.

8. Техническое обслуживание.

- 8.1. Кровать имеет простую надежную конструкцию и не требует ежедневного постоянного обслуживания.
- 8.2. Рекомендуется периодически - 1 раз в 6 месяцев, проводить осмотр кровати.

Периодический осмотр включает в себя:

 - осмотр колес, проверку работоспособности тормозов, свободное вращение колес вокруг своей оси;
 - осмотр всех секций (проверка надежности крепления узлов осей вращения, выявление деформаций упорных рамок и самих секций);
 - проверка надежности крепления колес к ножкам кроватных спинок,
 - осмотр кроватных спинок (проверка надежности крепления спинок к каркасу подматрачной рамы).

В случае обнаружения ослабленных соединений необходимо затянуть их гаечным ключом.
- 8.3. Колеса рекомендуется периодически - 1 раз в 6 месяцев, прочищать от грязи и смазывать подшипники.

9. Правила транспортировки и хранения.

9.1. Кровать в упаковке изготовителя может транспортироваться на любом виде закрытого транспорта при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 98% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

9.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен держать примесей, вызывающих коррозию металла.

10. Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях.

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кровати требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня получения изделия потребителем.

10.3. В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его части, пришедшие в негодность по вине изготовителя, по предъявлению гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией с заявкой на ремонт (замену), с указанием адреса, где находится изделие, номера телефона.

10.4. Рекламации на изделие и его части, подвергнутые ремонту у потребителя (в гарантийный срок) не удовлетворяются.

