


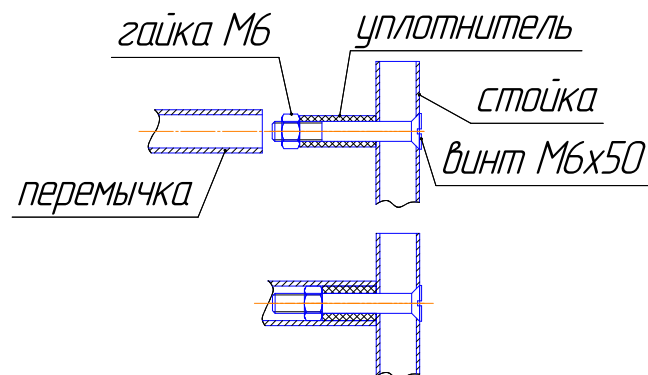

Сборка ширмы. Продолжение

5. Правила ухода

- 5.1. Ширма эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях с температурой воздуха от 10°C до 35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C .
- 5.2. Ширму необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия влаги, тепла и применяемых в медицинских учреждениях растворителей, щелочей и кислот.
- 5.3. Наружные поверхности ширмы устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.2. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

Адрес изготовителя:

Россия, 603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7 Г

ООО «Айболит-2000»

Тел. (831) 468-06-73

Факс (831) 417-89-98, 468-86-60

Упаковщик

М.П.

Дата выпуска _____

Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил и условий эксплуатации ширма долго будет служить Вам.

ООО «Айболит-2000»
Производство медицинской мебели

ПАСПОРТ

Ш И Р М А

медицинская

односекционная с полимерными

полотнами

ШМПС-01-«Айболит»

ГОСТ Р 50444-2020

ТУ 9452-008-51678895-2003

Нижний Новгород

1. Назначение и конструкция

- 1.1. Ширма медицинская односекционная с полимерными полотнами ШМПС-01 (в дальнейшем ширма) предназначена для защиты пациента при проведении осмотров или лечебных процедур в медицинских учреждениях и организациях.
- 1.2. Каркас ширмы выполнен из трубы $\varnothing 16$ мм. Покрытие каркаса – полимерно-порошковое RAL 9016. Каркас установлен на колесные опоры диаметром 40 мм, ошинованные резиной. Заполнение каркаса – полотно ПВХ.

2. Основные технические данные

- 2.1. Габаритные размеры одной секции, мм:
- высота – 1860 ± 1
 - ширина – 700 ± 1
- 2.2. Масса одной секции не более 4 кг.

3. Комплект поставки.

- 3.1. Полотно ПВХ – 1
- 3.2. Стойка длинная – 1
- 3.3. Стойка сварная – 1
- 3.4. Перемычка – 2
- 3.5. Винт М6х50 – 4, уплотнитель- 4, гайка М6- 4.

4. Инструкция по сборке

- 4.1. Распаковать каркас ширмы и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
- 4.2. Вставить в боковые пазы полотна ПВХ (3.1) сверху и снизу перемычки (3.4).
- 4.3. Вставить винт М6х50 в стойку длинную и сварную. Надеть на винт уплотнитель, закрутить гайку, немного сжав уплотнитель. Собрать перемычки со стойками (3.2, 3.3) при помощи собранных винтов М6х30 (3.5).

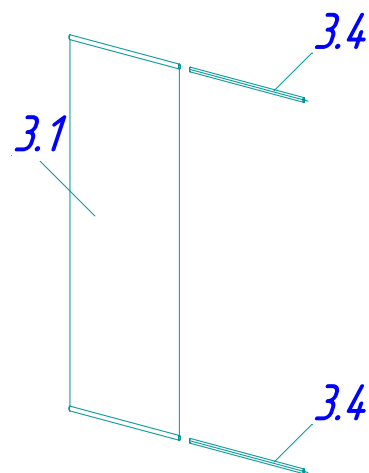


Рис. 1

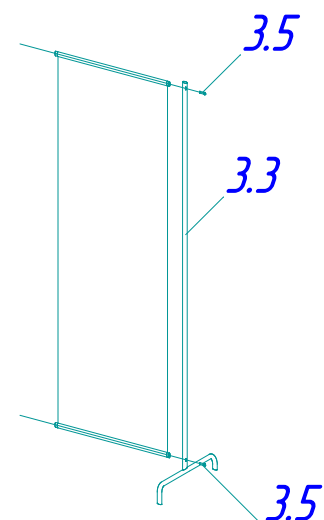


Рис. 2

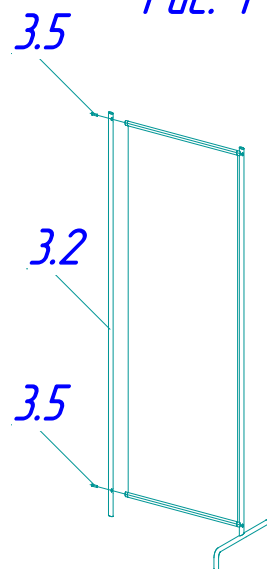


Рис. 3

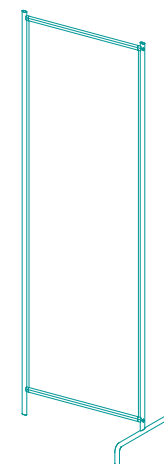


Рис. 4

Сборка ширмы

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Ш И Р М А

медицинская секционная с полимерными
полотнами ШМПС-01-«Айболит»


1. Комплект поставки

Для 1 секц ширмы 2х 3х 4х


- | | | |
|-------|----------------|------------------------------|
| 1.1. | Полотно ПВХ | – 1 шт./2 шт./3 шт./4 шт. |
| 1.2. | Стойка длинная | – 1 шт./2 шт. /3 шт./4 шт. |
| 1.3. | Стойка сварная | – 1 шт./2 шт./3 шт./4 шт. |
| 1.4. | Перемычка | – 2 шт./4 шт./6 шт./8 шт |
| 1.5. | Винт М6х50 | – 4 шт./8 шт./12 шт./16 шт. |
| 1.6. | Уплотнитель | – 4 шт./8 шт./12 шт. /16 шт. |
| 1.7. | Гайка М6 | – 4 шт./8 шт./12 шт./16 шт. |
| 1.8. | Колесо | – 3 шт./6 шт./9 шт./12 шт. |
| 1.9. | Хомут | – 0 шт./6 шт./12 шт./18 шт. |
| 1.10. | Винт М4х10 | – 0 шт./3 шт./6 шт./9 шт. |
| 1.11. | Гайка М4 колп. | – 0 шт./3 шт. /6 шт. /9 шт. |

2. Инструкция по сборке

- 2.1. Распаковать изделие.
2.2. Вставить перемычки (2.4) в полотно ПВХ (2.1).

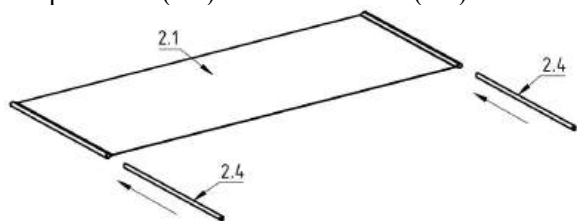


- 2.3. С помощью гаечного ключа 12 мм зафиксировать колёса (2.8) на стойках (2.2 и 2.3) ширмы.

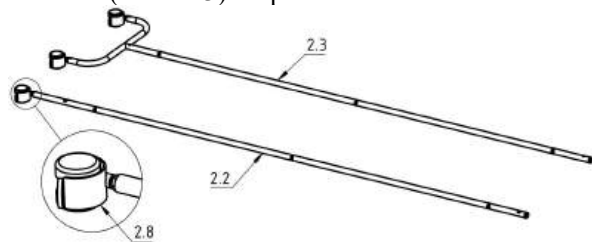


- 2.4. Установить 4 винта М6х50 (2.5) в стойки (2.2 и 2.3).

Шляпки винтов должны быть со стороны углублений в отверстиях. Установить на каждый винт (2.5) резиновый уплотнитель (2.6) и гайку М6 (2.7). Вращая отверткой винт, закрутить гайку до момента, когда она перестанет вращаться относительно уплотнителя. Уплотнитель не следует сильно сжимать гайкой во избежание затруднений при дальнейшей сборке.

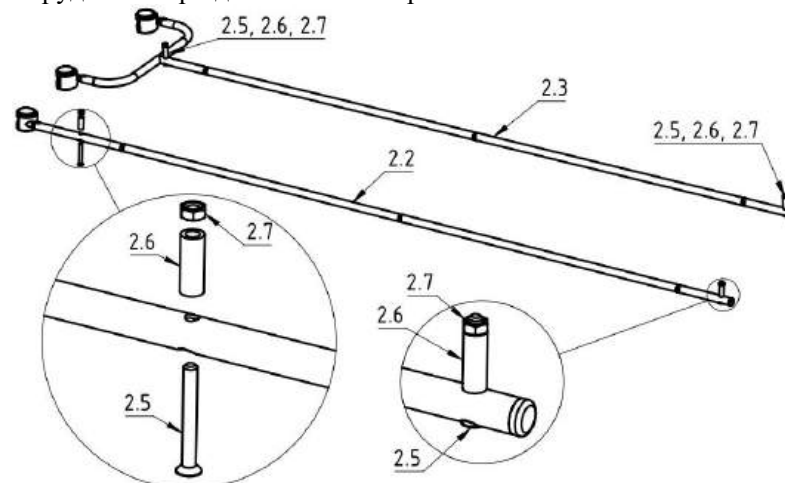

- 2.5. Собрать в единую конструкцию стойки и полотно ПВХ с перемычками. Прижимая перемычки к стойкам, затянуть отверткой винты (2.5) до надёжной фиксации элементов.

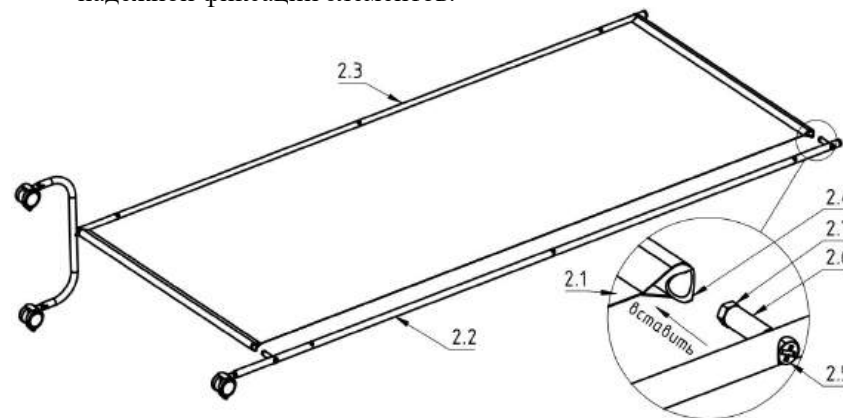


- 2.6. Поставить изделие в рабочее положение.

- 2.7. Для 1секц ширмы - Изделие готово к эксплуатации.

Для 2/3/4х секц ширм

- 2.8. Установить на каждую секцию три хомута (2.9) как показано на рисунке. Хомуты должны располагаться над отформованными на стойках упорами.

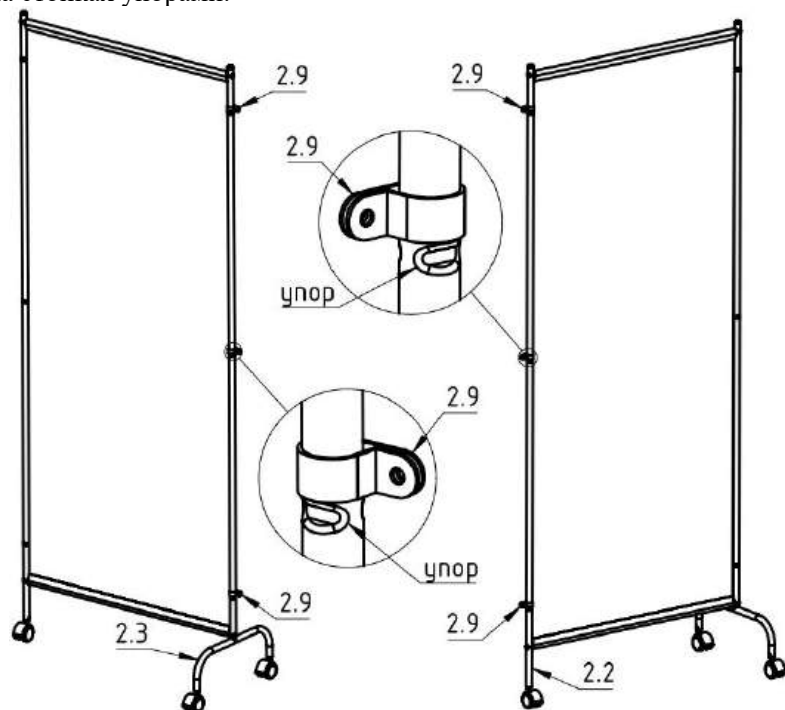

- 2.9. Совместить хомуты (2.9) секций и стянуть их между собой винтами М4х10 (2.10) и колпачковыми гайками М4 (2.11).

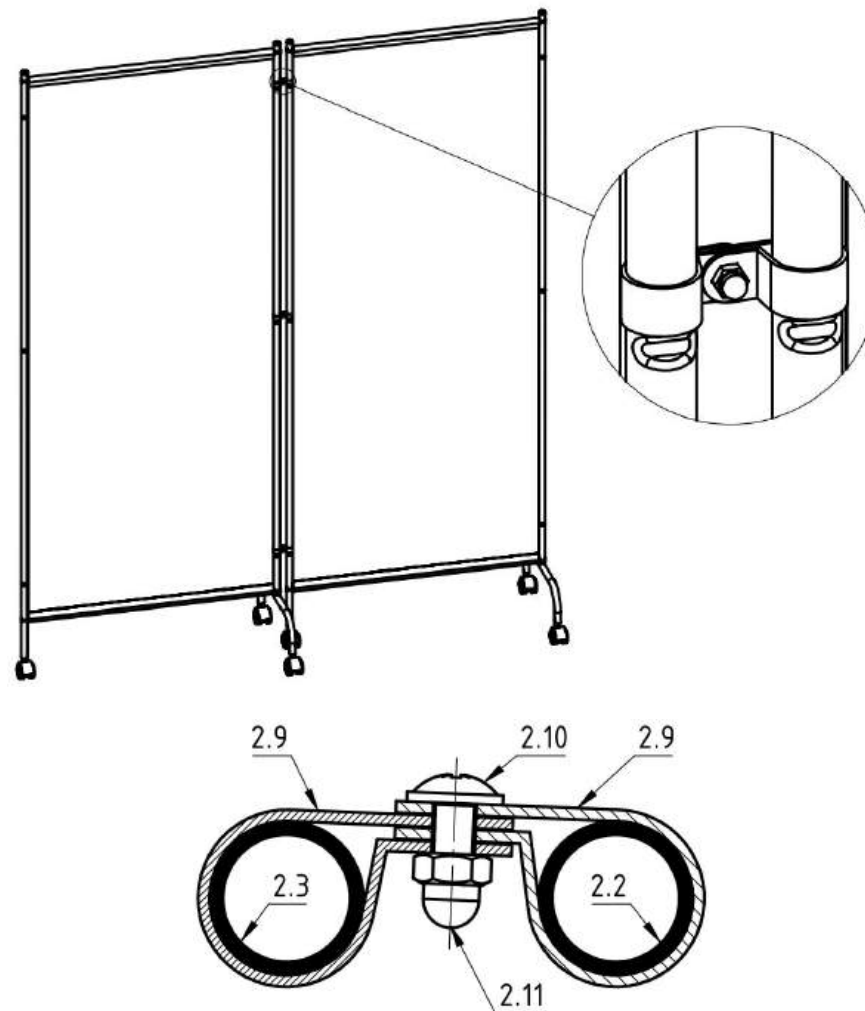


Схема расположения хомутов соседних секций.

- 3.0. Для 2/3/4х секц ширм - Изделие готово к эксплуатации.