

Столик инструментальный хирургический передвижной со столешницей из нержавеющей стали на стойке, регулируемой по высоте, для операционных СИО-01 (М) - «Электра»

Паспорт
МПЭЛ.942819.007-01П

НАЗНАЧЕНИЕ: Столик предназначен для размещения на нем инструмента и использования в стационарных и лечебно-профилактических учреждений различного профиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса. кг
Столик инструментальный хирургический передвижной со столешницей из нержавеющей стали на стойке, регулируемой по высоте, для операционных СИО-01 (М)-«Электра»	800x520x920÷1350* *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	7,5

Столик СИО-01 (М)-«Электра» является базовой моделью СИО-01 -«Электра». Размер полки - 665x430 мм. Столик должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой 3 кг. Столик регулируется по высоте от 920 до 1350 мм. Средний срок службы столика должен быть не менее 8 лет.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ. Столик представляет собой подвижный каркас на колесиках диаметром 50 мм, выполненный из нержавеющей стали и прошедший электрохимическую полировку. На каркасе располагается полка, высота подъема которой регулируется, выполненная из листовой зеркальной нержавеющей стали. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. Распакуйте столик и очистите его от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию столика дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Столик поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр столика на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения столика	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой	Подтянуть винт

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие столика СИО-01 (М)-«Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-007-39548518-2003 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Столика инструментального СИО-01 (М)-«ЭЛЕКТРА» ТУ 9452-007-39548518-2003

Заводской номер___б/н_____

Дата выпуска___04.2024_____

Приобретен_____

(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию_____

(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание_____

(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать
руководителя
ремонтного предприятия

подпись и печать
руководителя
учреждения владельца