

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Столики для инъекций (далее — столик) предназначен для расположения руки пациента при поведении инъекций на столах операционных универсальных СОу - «МСК», изготавливаемых по ТУ 9452-027-52962725-2008 .

1.2. Столик изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.1.1. Основные параметры и размеры столика указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров
	МСК-629/3
1. Габаритные размеры, ±5мм	500x130
2. Масса (пары), не более, кг	7
3. Крепление к рейке, мм	10x25

2.2. Характеристики:

2.2.1. Столик выдерживает номинальную равномерно распределенную нагрузку не более 20 кг.

2.2.2. Поверхность столика устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки столика для инъекций соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование изделия	Кол-во, шт.
1	Столик для инъекций (пара)	1
2	Подушка	2
3	Универсальный зажим	2
4	Паспорт	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Каркас столика изготовлен из нержавеющей стали.

4.2. Ложе изготовлено из пластика.

4.3. Подушка представляет собой мягкий элемент из эластичного пенополиуретана в чехле из винилскожи. Подушка крепится к панели столика при помощи застежки-липучки.

4.4. Столик имеет универсальный зажим для крепления к рейке операционного стола и позволяющий регулировать положение столика по высоте, вдоль панели операционного стола и вокруг вертикальной оси.

4.5. Панель столика рентгенопрозрачна.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К сборке и эксплуатации столика для инъекций допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию изделия и правила его эксплуатации.

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

6.1. После транспортирования столика в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2. Распаковать столик и проверить целостность деталей.

6.3. Проверить комплектность.

6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

7.2. Осуществить сборку согласно инструкции:

- установить универсальный зажим на направляющую операционного стола и зафиксировать;

- вставить стойку каркаса в зажим и зафиксировать на необходимой высоте;

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Столик не требует специального технического обслуживания .

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1. Столик в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С без конденсации влаги.

9.2. Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

10.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.

10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столики для инъекций(пара) МСК-629/3 _____
наименование и тип изделия

Дата выпуска _____ М.П.

Соответствуют ТУ 9452-027-52962725-2009 и признаны годными к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие медицинской техники _____
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
наименование и тип изделия

_____ номер ГОСТ или ТУ

Дата выпуска _____

Приобретен _____
дата, подпись, штамп торгующей организации

Производитель: ООО «Медстальконструкция»

Россия, 450024, Рб. г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00

