

# ПАСПОРТ

## Стол для груминга S800



2021 г.



## СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
2. ОПИСАНИЕ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	5
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	5
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	7
6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ .....	8
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	8
8. ПРАВИЛА ТРАСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ .....	8
9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ .....	9
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	9
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	11
12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА .....	11

# Стол для груминга S800

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Стол для груминга S800 электрический с П-образным держателем (далее изделие) предназначен для проведения комплексного косметического осмотра и ухода за домашними животными.

## 2. ОПИСАНИЕ

2.1. Изделие соответствует требованиям настоящего паспорта и технической документации.

2.2. Каркас изделия изготовлен из толстого металла с использованием качественной фурнитуры.

2.3. Материал столешницы – прорезиненное покрытие, МДФ.

2.4. В ножках стола находятся регулируемые опоры, которые позволяют компенсировать неровности пола.

2.5. Высота стола регулируется электроприводом. Электропривод приводится в действие от ножного пульта управления.



Рис. 1 Ножной пульт управления

2.6. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**3.1. Технические характеристики изделия представлены в таблице ниже**

Длина стола, мм	1200
Ширина стола, мм	600
Высота стола, мм	400-950
Масса стола, кг	~ 50,4
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	100±5

**3.2. Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенной к обработке поверхностей согласно МУ 287-113 утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.**

### 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**4.1. К работе с изделием допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.**

**4.2. Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной площадке.**

**4.3. Перед использованием необходимо убедиться в устойчивости изделия.**

**4.4. При эксплуатации запрещается нагружать изделие весом, превышающем значение, установленное в настоящем паспорте.**

**4.5. Запрещается эксплуатация неисправного изделия**

**4.6. Запрещается внесение изменений в конструкцию изделия**

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия.



## 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки

№	Наименование	Количество, шт.	Изображение
1	Стол для груминга S800	1	
2	Кронштейн П-образный	1	
3	Струбцина	1	
4	Ринговка	1	
5	Паспорт	1	-

## **6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ**

**6.1.** После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 2х часов.

**6.2.** Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки

## **7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**7.1.** Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

**7.2.** Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.

**7.3.** Запрещается допускать на рабочую поверхность стола нагрузку, превышающую допустимую.

**7.4.** Обслуживание изделия включает в себя периодическую подтяжку крепежных элементов и регулирование высоты стоек (ножек) при переустановке изделия на новое место.

**7.5.** Температурный режим эксплуатации от +10 °С до +35 °С и относительной влажности не более 80%.

## **8. ПРАВИЛА ТРАСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

**8.1.** Стол транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-



92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.2. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре -50 °С до +50 °С без конденсации влаги.

8.3. Транспортировка и хранение стола без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность стола. Повреждения стола, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

8.4. Хранение изделия должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

## 9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Стол не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

9.2. Утилизация стола осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии гарантийного талона с

отметкой торгующей организации о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

**10.2. Потребитель лишается права продажи в следующих случаях:**

- при истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений изделия по вине потребителя
- при несоблюдении пунктов 4, 7, 8 настоящего паспорта.
- при отсутствии паспорта изделия и при его не правильном заполнении

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

## 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

**Стол для груминга S800** соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации

Дата выпуска \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20 \_\_\_\_ г.

Подпись ответственного за приемку \_\_\_\_\_

## 12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие  
медицинской  
техники Стол для груминга S800  
(наименование  
и тип)

Серийный  
номер \_\_\_\_\_

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»  
155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2  
Контакты: + 7 (499) 110 52 38, opt@wikizoo.ru

Дата продажи \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20 \_\_\_\_ г.  
М.П. \_\_\_\_\_

(подпись, штамп торгующей организации)