

**РУКОВОДСТВО ООО МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ (С ЕДИНЫМ ЛОЖЕМ)
КФО-01- «МСК» (МСК-124, МСК-151, МСК-152)
ТУ 9452-001-52962725-01**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Кровать медицинская (далее по тексту — кровать) предназначена для использования в палатах медицинских учреждений.
1.2 Кровать изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры кровати указаны в таблице:

Параметры КФО-01- «МСК»	МСК-124	МСК-151	МСК-152
1. Габаритные размеры, не более, мм, ±10 мм			
Длина	2000	2000	1700
Ширина	840	720	720
Высота	760	675	675
2. Размеры ложа, мм, ±10 мм	1900x800	1900x700	1600x700
3. Высота до ложа, мм, ±10 мм	400	340	340
4. Масса, кг, не более	23	26	20

2.2. Характеристики:

- 2.2.1. Кровати изготовлены по единой технологии в виде сборно-разборной конструкции с использованием металлического профиля круглого и прямоугольного сечения, листового металла и металлической сетки.
2.2.2. Кровати выдерживают статическую равномерно распределенную по ложу нагрузку не более 130 кг.
2.2.3. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
2.2.4. Поверхности кровати устойчивы к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки кроватей соответствует указанному в таблице:

Наименование	КФО-01- «МСК»
	Кол-во, шт.
Ложе	1
Спинка	2
Болт М6х16	12
Гайка М6	12
Шайба пружинная 6	12
Матрац с чехлом*	1
Опора	8
Руководство	1

* - комплектуется по согласованию с заказчиком.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Кровати представляют собой сборно-разборную конструкцию.
4.2. Ложе кровати изготовлено из стального П-образного профиля и металлической сетки толщиной 4 мм с размером ячейки 50x50 мм.
4.3. Спинки изготовлены из стального профиля круглого сечения.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К сборке и эксплуатации кроватей допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию кроватей.

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 6.1. После транспортирования кроватей в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных условиях не менее 2 часов.
6.2. Распаковать кровати и проверить целостность покрытия.
6.3. Проверить комплектность.
6.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

- 7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего руководства.
7.2. Прикрепите ложе к спинкам болтами М6х16. Установите опоры в спинки.
7.3. Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления всех узлов. Установите кровать на место.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1. Кровать имеет простую надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.
8.2. Периодический осмотр включает в себя проверку надежности крепления резьбовых соединений.
8.3. В случае обнаружения ослабленных соединений необходимо затянуть болты гаечным ключом.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 9.1. Кровать в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.
9.2. Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем руководстве.

10.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

10.3. Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

10.4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

10.5. Средний срок службы 6 лет. За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать медицинская общебольничная (с единым ложем) КФО-01- «МСК» _____

Дата выпуска _____

М. П.

Соответствует ТУ 9452-001-52962725-01 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

(Хабибуллин Р.Р)

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие _____

наименование и тип изделия

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска _____

Приобретено _____

дата, подпись, штамп торгующей организации

Производитель: ООО «Медстальконструкция»

Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)292-26-00

