

### Инструкция по сборке и эксплуатации

**Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004-16789225-2018 тип М192-04** с 2-мя держателями, на 5-лучевой опоре

**Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004-16789225-2018 тип М192-04к** с 2-мя держателями, на 5-лучевой опоре и роликах

**Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004-16789225-2018 тип М192-05** с 4-мя держателями, на 5-лучевой опоре

**Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004-16789225-2018 тип М192-05к** с 4-мя держателями, на 5-лучевой опоре и роликах

**Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8971 от 14 октября 2019 г.**


#### Комплектность поставки

- стойка опорная на пятилучье – 1 шт.  
с 5-ю заглушками //или 5-ю колесными опорами Ø35
- стойка выдвижная с 2-мя держателями – 1 шт. (М192-04)
- стойка выдвижная с 4-мя держателями – 1 шт. (М192-05)
- пластиковый переходник – 1 шт.
- болт барашек М8 – 1 шт.

#### Инструкция по сборке капельницы

1. Освободить все комплектующие от упаковки.
2. *В моделях с колесными опорами: вставить колесные опоры в торцы труб.*
3. Вставить выдвижную стойку с держателями в опорную стойку через переходник, опустить до нужного уровня и зажать болтом барашком.

**Во время проведения процедур капельницу не передвигать!**

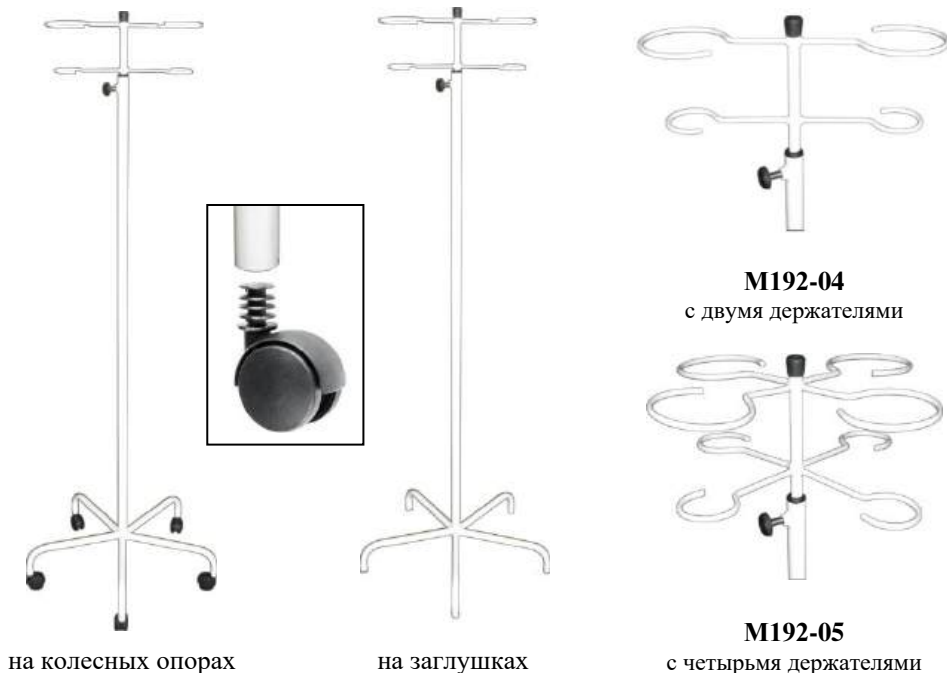

#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 15150, ГОСТ Р 50444, ГОСТ 177, ГОСТ 25644.
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи изделия.

Во избежание

недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.

ООО "Техсервис", 192174, Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, 23-Б

тел.: (812) 362-42-79

web: [www.zavodmebel.ru](http://www.zavodmebel.ru)

E-mail: [info@zavodmebel.ru](mailto:info@zavodmebel.ru)