

**Столик инструментальный хирургический передвижной со столешницей из нержавеющей стали на стойке, регулируемой по высоте, для операционных СИО-01 (Б-ус4)-«Электра»**

**Паспорт  
МПЭЛ.942819.007-06П**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Столик предназначен для размещения на нем инструмента и использования в стационарных и лечебно-профилактических учреждениях различного профиля. Столик выполнен из нержавеющей стали, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Столик инструментальный хирургический передвижной со столешницей из нержавеющей стали на стойке, регулируемой по высоте, для операционных СИО-01 (Б-ус4)-«Электра»	810x545x920÷1350* *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	9,4

Столик СИО-01 (Б-ус4)-«Электра» является модификацией базовой модели СИО-01 -«Электра» (в конструкцию каркаса добавлено усиление под полкой, для увеличения максимальной нагрузки, которую должна выдерживать полка). Равномерно распределенная нагрузка на полку 5 кг.

Размер полки - 740x510 мм. Столик регулируется по высоте от 920 до 1350мм. Средний срок службы столика должен быть не менее 8 лет.

**УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.** Столик представляет собой подвижный каркас на четырех колесиках диаметром 50 мм, выполненный из нержавеющей стали и прошедший электрохимическую полировку. На каркасе располагается полка, высота подъема которой регулируется, выполненная из листовой зеркальной нержавеющей стали. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании.

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.** Распакуйте столик и очистите его от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию столика дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ.** Столик поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр столика на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения столика	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н.

**ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой	Подтянуть винт

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.**

Изготовитель гарантирует соответствие столика СИО-01 (Б-ус4)-«Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-007-39548518-2003 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Производитель имеет право без согласования вносить конструктивные изменения, улучшающие функциональность изделия.

**Гарантийный талон**

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Столика инструментального СИО-01 (Б-ус4)-«ЭЛЕКТРА» ТУ 9452-007-39548518-2003

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Приобретен \_\_\_\_\_

(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию \_\_\_\_\_

(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание \_\_\_\_\_

(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать  
руководителя  
ремонтного предприятия

подпись и печать  
руководителя  
учреждения владельца

