

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

ООО Медицинская Компания «АСК»



изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 32.50.30-003-68690950-2014 и признан годным для эксплуатации.

Упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 32.50.30-003-68690950-2014.

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Кушетка медицинская смотровая _____
обозначение

Серийный № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца _____

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____
подпись

ШИРМА

ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00

Паспорт

ШМ.00.00.2014.ПС.01



г. Нижний Новгород

версия 1.1

2024


ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Приложение 1

Приложение 1

Схема сборки изделий Ширмы ШМ.01.00-ШМ.04.00

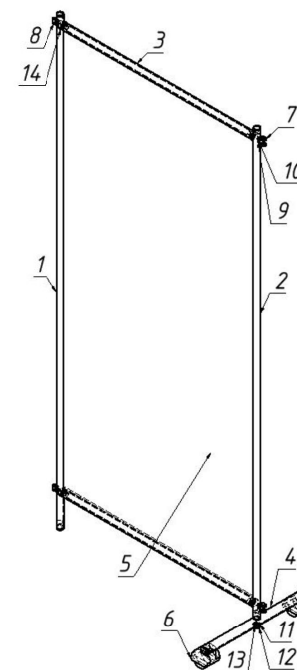

Спецификация					
№ п/п	Наименование	ШМ. 01.00	ШМ. 02.00	ШМ. 03.00	ШМ. 04.00
1	Стойка	1 шт.	2 шт.	3 шт.	4 шт.
2	Стойка с резьбой	1 шт.	2 шт.	3 шт.	4 шт.
3	Перемычка	2 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
4	Ножка	1 шт.	2 шт.	3 шт.	4 шт.
5	Полотно ПВХ	1 шт.	2 шт.	3 шт.	4 шт.
6	Колесо мебельное	2 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
7	Петля М8 (в сборе)	2 шт.	2 шт.	4 шт.	6 шт.
8	Винт М8х35 (получилиндр)	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
9	Шайба 8	4 шт.	8 шт.	12 шт.	16 шт.
10	Гровер 8	4 шт.	8 шт.	12 шт.	16 шт.
11	Шайба 10	1 шт.	2 шт.	3 шт.	4 шт.
12	Болт М10х45	1 шт.	2 шт.	3 шт.	4 шт.
13	Гровер 10	1 шт.	2 шт.	3 шт.	4 шт.
14	Шайба овальная пластик	4 шт.	8 шт.	12 шт.	16 шт.

Для сборки потребуются гаечные ключи на 17мм и 12мм, крестовая отвертка.

1. Распаковать компоненты ширмы.
2. Одеть полотно (поз.5) на перемычки (поз.3).
3. Установить между Стойкой (поз.1,2) и перемычками (поз.3), пластиковую шайбу (поз.14) и соединить крепежом (поз.8, 9 и 10).
4. При помощи крепежа (поз.11, 12 и 13) установить к стойке с резьбой (поз.2) ножки (поз.4) при помощи ключа на 17.
5. Установить на ножки ширм колеса (поз.6) при помощи ключа на 12.
6. Скрепить каркасы ширм петлями (поз.7) (для ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00)

5.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

5.3. Утилизация

5.3.1 Утилизация изделия осуществляется после завершения срока эксплуатации изделия, а так же в случае, когда восстановление и ремонт становятся нерентабельными.

5.3.2 Утилизация изделий производится в соответствии с установленными нормами и правилами, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

5.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

5.4. Гарантии изготовителя

5.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

5.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

5.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК», email: otk@tdask.ru.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.

1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.

1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.

1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Ширма, в вариантах исполнения: ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00.

Изделие выпускается по ТУ 32.50.30-003-68690950-2014 в составе исполнений:

I. Набор мебели для медицинских кабинетов;

II. Набор мебели для медицинских палат

медицинского изделия «Набор мебели для медицинских кабинетов и палат по ТУ 32.50.30-003-68690950-2014».

Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024

2.2 Сведения о производителе:

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Комплектность изделия «Ширма, в вариантах исполнения: ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00» указана в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование, обозначение	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Ширма, в вариантах исполнения: ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00, в составе:		1
1.1	Ширма	ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00	1
1.2	Паспорт	ШМ.00.00.2014.ПС.01	1

2.4 Специфичное назначение изделия:

Наименование изделия	Назначение
Ширма: ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00	Предназначено для разделения пространства (зонирования помещения), изолирования пациентов и создания комфортной среды для пациента при проведении медицинских осмотров или других процедур в смотровых, диагностических, процедурных, терапевтических кабинетах, больничных и реанимационных палатах медицинских организаций

2.5 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).

2.6 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.7 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444:

- группа 2:

- Ширма, в вариантах исполнения: ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

3.1 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и других агрессивных химических соединений).

3.2 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.

3.3 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности или кромки детали изделия (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить.

3.4 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.

3.5 Не допускайте раскачивания и ударов изделия.

3.6 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.

3.7 Не допускается приложение статических, динамических и ударных нагрузок на изделие.

3.8 Не допускается перемещение изделия волоком, движение должно осуществляться только качением. При наличии преград на полу (пороги, ступени и т.д.) ширму не следует наклонять. Через преграды ширму следует переносить вдвоем, приподнимая за металлические боковые стойки каркаса.

3.9 Не допускается применение изделия не по назначению.

3.11 Периодически следует проводить осмотр изделия, для очистки колес от загрязнения, смазывания движущихся частей колес и визуального осмотра изделия полностью на предмет сохранения конструктивной целостности и функциональных свойств.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделия приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

Наименование, исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
Ширма				
ШМ.01.00	770±39× 410±21× 1700±85	5±0,5	-	1 секция; секция изделия устанавливается на 3 опоры: две колесные (без тормозного устройства) и одну нерегулируемую опору
ШМ.02.00	1570±120× 410±21× 1700±85 Размеры одной секции 770±39× 410±21× 1700±85	9±1	-	2 секции; каждая секция изделия устанавливается на 3 опоры: две колесные (без тормозного устройства) и одну нерегулируемую опору

Наименование, исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
ШМ.03.00	2365±150× 410±21× 1700±85 Размеры одной секции 770±39× 410±21× 1700±85	13±2	-	3 секции; каждая секция изделия устанавливается на 3 опоры: две колесные (без тормозного устройства) и одну нерегулируемую опору
ШМ.04.00	3160±200× 410±21× 1700±85 Размеры одной секции 770±39× 410±21× 1700±85	16±2	-	4 секции; каждая секция изделия устанавливается на 3 опоры: две колесные (без тормозного устройства) и одну нерегулируемую опору

4.2 Изделия установлены на опоры, согласно таблице 3, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола.

Таблица 3.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение исполнения	Опоры		
			Колесные опоры, диаметр колес, мм допуск ± 3 м	Регулируемые опоры	Нерегулируемые опоры
1	Ширма*	ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00	50	-	+

*- каждая секция изделия имеет 3 опоры: два колеса (без тормозного устройства) и одну нерегулируемую опору.

5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Срок службы

5.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

5.2. Условия транспортирования и хранения

5.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха не более 100% при температуре плюс 25°С.

5.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.