

## Инструкция по сборке и эксплуатации

### Стул медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-003-16789225-2018 модель M22

#### Комплектность поставки

Каркас сварной металлический – 1 шт.  
Сиденье пластиковое – 1 шт.



#### Крепежные изделия



Болт оцинкованный сантехнический М6х40 – 4 шт.

Шайба М6 – 8 шт.

**Вам потребуется:** гаечный ключ.

#### Инструкция по сборке стула

1. Освободить все комплектующие от упаковки.
2. Расположение каркаса относительно сиденья см. рис. 1.
3. Соединить каркас стула с пластиковым сиденьем через отверстия в каркасе при помощи 4-х болтов М6х40, предварительно одев на них по две шайбы 6 (см. рис. 2).

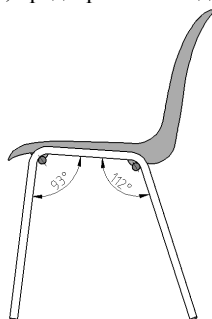


Рис. 1

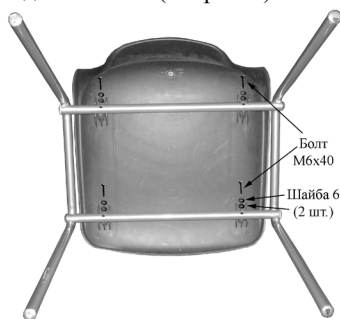


Рис. 2

#### Инструкция по соединению нескольких стульев

В комплектность поставки включены две металлические вставки на каждое соединение стульев.



Рис. 3

Вынуть из каркасов стульев по две боковые пробки с тех сторон, где они будут соединяться друг с другом и вставить туда две металлические вставки таким образом, чтобы отверстия на вставках совпали с отверстиями на каркасе (см. рис. 4).

1. Соединить каркас стула с пластиковым сиденьем через отверстия в каркасе при помощи 4-х болтов М6х40, предварительно одев на них по две шайбы 6 (см. рис. 2). Расположение каркаса относительно сиденья см. рис. 1.
2. Таким же образом присоединить необходимое количество стульев.



Рис. 4

#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 15150, ГОСТ Р 50444, ГОСТ 177, ГОСТ 25644.
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45-70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи изделия.  
Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.  
Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.  
Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.