

Паспорт

Стол пеленальный
(на металлокаркасе)

СПМ 1/01

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.28, пом. 34
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.supl.biz

Заводской номер:

Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____



Сертификат Соответствия
РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.00000
Срок действия с 19.02.2024 по 18.02.2027
г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Стол предназначен для пеленания детей.
 1.2. Ложе изготовлено из ДСП, обтянутого винилискожей. Наполнение ППУ 20 мм. Каркас выполнен из профильной трубы 25*25 мм., с полимерно-порошковым окрашиванием. Предусмотрена полка для пеленок.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	глубина	
960	870	720	30

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Рамка задняя	1
3.1.1	Спинка мягкая	1
3.2	Рамка боковая	2
3.2.2	Боковина мягкая	2
3.3	Ложе стола 825*680 мм.	1
3.4	Полка 830*545 мм.	1
3.5	Болт мебельный М6*60	4
3.6	Гайка М6	4
3.7	Саморез 4,2*40	10
3.8	Шайба к М 6	4
3.9	Стяжка межсекционная	6
3.10	Винт потай 6*25	6
3.11	Паспорт	1
3.12	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Сборка должна производиться квалифицированным специалистом.

- 4.1 Распаковать компоненты стола.
- 4.2 Соединить боковые рамки 3.2 с задней рамкой 3.1 при помощи болтов 3.5 и гаек 3.6. не затягивая (наживить)
- 4.3 Поставить ложе (не закрепляя) и присоединить мягкие элементы задний 3.1.1 и боковые 3.2.2.
- 4.4 С помощью крестовой отвертки соединить металлокаркас с ложем стола 3.3 и полкой 3.4 саморезами 3.7 через имеющиеся в металлокаркасе отверстия.
- 4.5 Подтянуть все соединения.

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место долговременного расположения мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.