



Акционерное общество
"Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001.
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

ОКП 94 5210

ПУ № ФСР 2010/07065 от 03.11.2015 г.

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ КГ-1 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) Ц5040.00.000 ПС



Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед регулировкой и эксплуатацией.
Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 (в дальнейшем - кресло) предназначено для помещения на него женщин при гинекологических обследованиях, проведении различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах.
Кресло применяется в медицинских учреждениях.
Кресло изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 и 04.2 по ГОСТ Р 50444 в соответствии с требованиями ТУ 9452-021-07614107-2004.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Длина (от подножки до спинки в разложенном виде)	1605 ± 50 мм
Ширина (по подколеникам)	925 ± 50 мм
Высота кресла	1640 ± 50 мм
Высота кресла в разложенном виде	900 ± 30 мм
Масса, не более	75 кг
Предельная рабочая нагрузка на кресла	180 кг
Углы наклона: - спинки от вертикали - сиденья от горизонтали (с предельным отклонением ± 5°)	20° - 100° 0° - 20°
Усилие, необходимое для перемещения таза, не более	5 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

3. Комплектность

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Величина номинальной нагрузки, не более	Количество, штук
1	Кресло гинекологическое с ручным приводом (без съёмных частей)	60 кг - на спинку 120 кг - на сиденье 120 кг - на подножку	1
Съёмные части			
2	Подколенник	20 кг на каждый	2
3	Тазик или тазик со сливом	4 кг	1
4	Упор для рук правый	20 кг	1
5	Упор для рук левый	20 кг	1
Эксплуатационная документация			
6	Руководство по эксплуатации (паспорт)		1

3.1. Дополнительные съёмные части могут быть поставлены Заказчику по отдельному договору с заводом-изготовителем.

3.2. Перечень дополнительных съёмных частей приведен в Таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Подголовник	1
2	Столик инструментальный	1
3	Штатив для вливаний	1

4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

4.1. Основание 15 кресла снабжено двумя роликами 1 для передвижения, шарнирной подножкой 2, спинкой 7 и сиденьем 8 с механизмами наклона сиденья и спинки (растомат) 9.

4.2. После получения кресла, необходимо распаковать его.

4.3. Для регулировки наклона спинки 7 и сиденья 8 используется механизм наклона (растомат) 8. Чтобы опустить сиденье или спинку, необходимо поднять их в крайнее верхнее положение и медленно опустить до необходимого угла наклона.

Внимание! При регулировке угла наклона спинки или сиденья следить, чтобы фиксатор как левого, так и правого механизма растомат находился в рабочем положении (в фиксирующем пазу).

4.4. Под сиденьем в кассете 20 разместить выдвигной тазик или тазик со сливом 19 для сбора жидкости. Кассету 20, при поставке не в сборе с креслом, установить согласно рисунка 1, закрепив ограничительные шайбы винтами на торцах направляющих после установки во втулках под сиденьем кресла.

4.5. Подножку 2 установить в необходимое положение.

4.6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** регулировка частей с пациентом, размещенным на кресле, а также эксплуатация неисправного кресла.

Перед каждым использованием убедиться в надёжности фиксирования закрепления всех частей кресла.

10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

10.1. Истечение гарантийного срока.

10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.

10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.

10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.

10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.

10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:

- наименования товара;

- даты ввода товара в эксплуатацию;

- описания дефекта товара и характера неисправности;

- обстоятельств выявления дефекта;

- контактной информации ответственного лица.

2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.

3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

12. Свидетельство о приемке

Кресло гинекологическое
с ручным приводом

Наименование изделия

КГ-1

Обозначение

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Сборщик / упаковщик



Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.



Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.



Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:


- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию;
- описания дефекта товара и характера неисправности;
- обстоятельств выявления дефекта;
- контактной информации ответственного лица.

2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.

3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

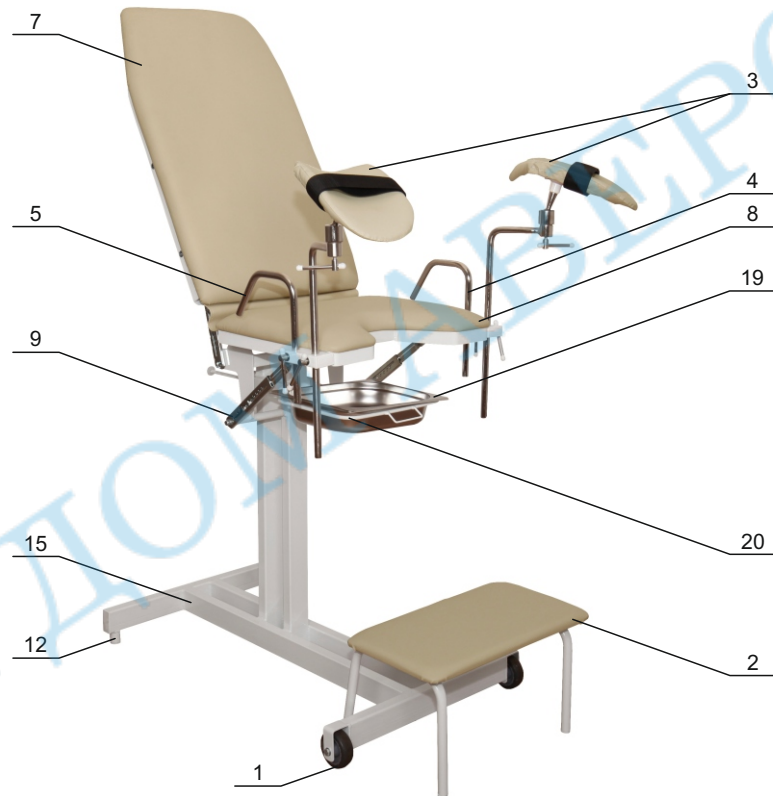

- 1 - ролики; 2 - шарнирная подножка; 3 - подколеник; 4 - упор для рук (левый); 5 - упор для рук (правый); 7 - спинка; 8 - сиденье; 9 - механизм наклона сиденья и спинки (растомат); 12 - регулируемая опора; 15 - основание; 19 - тазик или тазик со сливом; 20 - кассета

Рисунок 1

5. Техническое обслуживание

5.1. Перед вводом в эксплуатацию и перед эксплуатацией необходимо расконсервировать кресло промывкой моющими растворами, проверить отсутствие погнутых деталей, вмятин, коррозии металла, крепление всех болтовых и других видов соединений всех частей кресла, убедиться в надёжности фиксирования и крепления, а при необходимости закрепить их, произвести санитарную обработку перед использованием и после каждого использования.

5.2. Проверку технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводите: проверкой углов наклона по пункту 1.5. спинки и сиденья с помощью любых доступных угломеров или средств; проверкой усилий по пунктам 1.6., 1.7., 1.8. с помощью динамометров ДПУ-0,2-2-УХЛ по ГОСТ 13837; проверкой работы механизма фиксации спинки размещением на ней равномерно-распределенной нагрузки 90 кг, после

выдержки в течение 2 часов спинка не должна смещаться вниз под нагрузкой; проверкой комплектности по пункту 3 и других параметров.

5.3. Характерные неисправности кресла: ослабление крепёжных резьбовых и других элементов устраните подтягиванием или заменой на годные элементы; затруднение наклона сиденья и спинки устраните разборкой, при необходимости, заменой изношенных деталей на годные, последующей смазкой трущихся поверхностей консистентной смазкой.

5.4. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 1% раствором хлоромина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

6. Консервация

6.1. Металлические детали кресла и съёмных частей должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

6.2. Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 подвергнуто в АО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-021-07614107-2004.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование кресла должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

7.2. Кресло должно храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7.3. Для перемещений кресла внутри помещений используются встроенные колесные опоры: приподнимите кресло за раму основания (наклоните в сторону сиденья) до отрыва от пола задних опор и переместите кресло в нужное место. При необходимости, отрегулируйте опоры.

7.4. Для перемещения кресла по порогам, лестницам и в другое помещение - обязательно полностью поднимайте кресло за раму основания, предназначенными для этого средствами достаточной грузоподъемностью.



Запрещается подъем, наклон или переноска кресла за спинку и съёмные приспособления - это может привести к механическим повреждениям и потере гарантии производителя. Также, запрещается вставать (садиться) на спинку кресла.

8. Сведения об утилизации

Поскольку кресло не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.

9.2. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-021-07614107-2004.

9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.

9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок производителя


Наименование товара	КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ КГ-1
Серийный номер	Дата производства
Гарантийный срок	12 месяцев со дня продажи

Заполняет продающая организация

Наименование продающей организации

Дата продажи

ФИО / Подпись

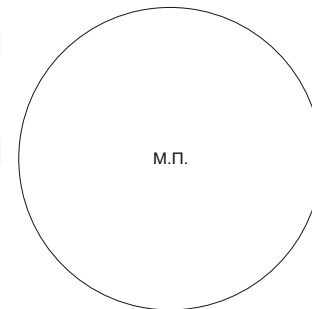

Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен. К комплектации и внешнему виду товара претензий не имею.

Наименование покупателя

ФИО / Подпись

